

GoTalk®

NEW



Benutzerhandbuch

**JETZT MIT
KI-GESTÜTZTEN
FUNKTIONEN!**

INHALT

1	Einführung	1
1.1	Funktionen der künstlichen Intelligenz	1
2	Seiten-Editor	3
2.1	Seitenoptionen	4
2.1.1	Hintergrund	4
2.1.2	Tasten	4
2.1.3	Scan-Signale	4
2.1.4	Aktiviert	4
2.1.5	Express-Seite	4
2.1.6	Seitenspezifisches Scannen	4
2.1.7	Alternatives Layout Verwenden	4
2.1.8	Quizseite (Zufall)	4
2.1.9	Laut Aussprechen	4
2.1.10	Symbol Export to GoTalk Connect	6
2.1.11	Symbol Seite Teilen	6
2.2	Nachrichtentasten mit dem Schnell-Editor erstellen	7
2.2.1	Tastentext und KI-Vorschläge	7
2.2.2	Bild	7
2.2.3	Aktion	8
2.2.4	Folgeaktion	9
2.2.5	Hörsignal	9
2.2.6	Schnelles Farbschema	9
2.2.7	Schriften und Farben	9
2.3	Nachrichtentasten mit dem Klassischen Editor erstellen	10
2.3.1	Tastentext taste	10
2.3.2	Aktion	11
2.3.3	Bild	12
2.3.4	Folgeaktion	12
2.3.5	Hörsignal (falls aktiviert)	12
2.3.6	Hintergrund	12
2.3.7	Rahmen	12



GoTalk NOW-Videos!

Scannen Sie den QR-Code, um Videos zur KI und zu weiteren Funktionen von GoTalk NOW anzusehen.

[GoTalk NOW Tutorial-Reihe](#)

2.4	Tasten Verwalten	13
2.4.1	Löschen	13
2.4.2	Schnell - Oder Klassischer Editor	13
2.4.3	Umordnen	13
2.4.4	Kopieren	13
2.4.5	Deaktivieren	13
2.4.6	Stapelbearbeitung	13
2.5	Seitenbeschriftung	15
2.5.1	Titel Der Seitenbeschriftung	15
2.5.2	Symbol Der Seitenbeschriftung	15
2.5.3	Hörsignal Für Seiten	15
2.5.4	Schrift Festlegen	15
2.6	Schnellstasten	15
2.7	Neue Seiten Zu Einem Buch Hinzufügen	16
2.7.1	Seiten-Assistent	17
2.7.2	Szenen- Und Hybridseite	22
2.8	Buchseiten Verwalten	26
3	Den GoTalk NOW Player Verwenden	27
3.1	Navigationsleiste Des Players	27
3.2	Tastaturseiten Verwenden	28
3.2.1	Der Phrasen-Ordner	30
3.2.2	CARA: Conversation-Aware Response Assistant	30
3.3	Express-Seiten Verwenden	31
4	Kommunikationsbuch hinzufügen	33

INHALT

5	Kommunikationsbücher Verwalten	34
5.1	Reihenfolge der Bücher ändern	34
5.2	Änderungsprotokoll	34
5.3	Vokabelbericht (nur Englisch)	35
5.4	Buchoptionen	35
6	Kommunikationsbuch Sichern Und Teilen	37
6.1	Komprimiertes Buch Teilen	37
6.1.1	Buch Aus Files in GTN Exportieren	38
6.2	AirDrop	38
6.3	Cloud-Speicher	39
6.4	Sichern/Wiederherstellen MIT iTunes Und Finder	39
6.4.1	Sicherung Auf Ihrem Computer über Den Finder	40
7	Vorlagen: Erstellen, Teilen, Herunterladen	41
7.1	Eine Vorlage Erstellen	41
7.2	Eine Vorlage Teilen	42
7.2.1	Email	42
7.2.2	In Online-Galerie Hochladen	43
7.2.3	Teilen	44
7.3	Kostenlose Vorlagen Herunterladen	44
7.3.1	Vorlagen Online - Webbrowser	45
7.4	OBf- Und OBZ- Dateien Importieren	45
7.4.1	Eine OBf- Oder OBZ-Datei Zum iPad Hinzufügen	45
7.4.2	Eine Importierte OBf/OBZ Zu Einem GTN-Buch Hinzufügen	46
7.4.3	Importierte Dateien Verwalten	46
8	Scannen Und Schalterzugriff	47
9	Herunterladen	49
9.1	Käufe Wiederherstellen	50
10	Export An GoTalk Connect	51
11	Einstellungen	54



Erstellen Sie mit **GoTalk NOW** Kommunikationsbücher mit interaktiven Nachrichtentasten. Erstellen Sie Buchseiten im Editor und kommunizieren Sie damit im Player. Kommunikationsbücher können Seiten mit einem Raster aus Nachrichtentasten enthalten, Szenenseiten mit einem großen Bild und Hotspots, die Nachrichten abspielen, oder Tastaturseiten zum Tippen von Nachrichten, teils mit Wortvorhersage und Sprachausgabe.

Jede Nachrichtentaste lässt sich umfassend anpassen: Text, Farben, Bilder, Aktionen, Hörsignale und Folgeaktionen. Als Aktion stehen zur Wahl: aufgenommene Nachricht, Sprachausgabe, Musik, URL öffnen, zu anderer Seite wechseln/springen oder „Laut aussprechen“ aktivieren. Die Folgeaktion bestimmt, was nach der Aktion geschieht.

Die Schaltfläche **Hilfe** auf dem Startbildschirm bietet schnellen Zugriff auf Benutzerhandbücher, Video-Tutorials und Tipps, E-Mail-Support sowie eine Liste mit Tipps & Funktionen.



Fig.11 Eine Rasterseite mit 16 Nachrichtentasten.



Fig.12 GoTalk NOW Startbildschirm.



Sehen Sie sich
Videos zu den
Funktionen von
GoTalk NOW an!

GoTalk NOW Tutorial-Reihe

1.1 FUNKTIONEN DER KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ

GoTalk NOW bietet KI-gestützte Funktionen, die das Erstellen von Kommunikationsbüchern beschleunigen, die Seitengestaltung vereinfachen und das Bearbeiten von Nachrichten erleichtern. Diese Funktionen sind optional; GoTalk NOW funktioniert mit oder ohne KI gleich, und jede Seite, jedes Buch und jede Nachricht lässt sich weiterhin manuell erstellen.



Öffnen Sie das Benutzerhandbuch als PDF in der App iBooks für ganzseitige Ansicht und Textsuche.



Apple Intelligence erfordert ein kompatibles iPad, auf dem die Funktion in den iPad-Systemeinstellungen aktiviert ist. Aktuelle Hinweise zu Gerätekompatibilität und Einrichtung finden Sie in Apples Dokumentation.



CARA erfordert zusätzlich zu **Apple Intelligence** iOS 26 oder neuer.

DATENSCHUTZ & FUNKTIONSWEISE

Die KI-Funktionen in **GoTalk NOW Apple Intelligence**, das vollständig auf dem Gerät läuft. Das bedeutet:

- Die KI-Verarbeitung erfolgt direkt auf dem iPad, nicht in der Cloud.
- Keine Inhalte Ihrer Kommunikationsbücher werden an Attainment Company oder Dritte gesendet.
- Attainment erfasst, speichert und sieht keine von den KI-Funktionen erzeugten Daten.

WO KI IN GOTALK NOW HILFT

KI-Hilfe ist appübergreifend verfügbar und macht das Erstellen von Seiten und Nachrichten schneller und einfacher. Es folgt ein Überblick zum KI-Einsatz. Jeder Bereich wird im jeweiligen Abschnitt dieses Handbuchs näher beschrieben.

Schnell-Editor: Beim Bearbeiten einer Nachrichtentaste kann die KI Tastentext und Sprachausgabe vorschlagen, basierend auf anderen Tasten der Seite. Auf einer Seite mit "Apfel", "Banane" und "Orange" schlägt die KI etwa Verwandtes wie "Traube" oder "Erdbeere" vor. (Siehe Abschnitt 2.2.1)

Stapelbearbeitung: Beschreiben Sie die gewünschten Änderungen in einfacher Sprache, und die KI wendet sie auf mehrere Nachrichtentasten zugleich an. Vor dem Speichern wird eine Vorschau angezeigt. (Siehe Abschnitt 2.4.6)

Seiten-Editor: Vorschläge für Seitentitel: Anhand der Nachrichtentasten der Seite kann die KI einen Seitentitel vorschlagen. (Siehe Abschnitt 2.5)

Bilder & Symbole hinzufügen: Bei der Suche in der **GoTalk Image Library** oder anderen Bildquellen erweitert die KI Ihre Suche um verwandte Begriffe. Eine Suche nach "Welpen" liefert etwa auch Ergebnisse für "Hund". (Siehe Abschnitt 2.2.2)

Foto zu Illustration: Die KI kann ein Foto in eine Illustration oder ein Symbol umwandeln. Wählen Sie aus drei Stilen passend zum Look Ihres Kommunikationsbuchs.

Szenenseiten: Salienzenerkennung: Wird einer Szenenseite ein Hotspot hinzugefügt, erkennt die KI automatisch Objekte im Hintergrundbild und passt Größe und Position des Hotspots daran an. Hotspots lassen sich danach weiterhin manuell anpassen.

Seiten-Assistent: Prompt-basierte Layouts: Sie können Tastentext manuell eingeben oder die gewünschte Seite in einfacher Sprache beschreiben; die KI erzeugt dann ein vollständiges Seitenlayout samt Tastentext und passenden Bildern. (Siehe Abschnitt 2.7.1)

CARA (Conversation-Aware Response Assistant): Auf Tastaturseiten nutzt CARA das Mikrofon des iPads, um die gesprochenen Worte eines Gesprächspartners zu erfassen, und bietet dem AAC-Nutzer passende Antwortvorschläge zur Ausgabe per Sprachausgabe. (Siehe Abschnitt 3.2.2)

Videos zur KI und zu weiteren Funktionen sind unter youtube.com/@AttainmentCompany abrufbar; suchen Sie nach „GoTalk NOW Tutorial Series“.

Eine Nachrichtentaste auf der Seite kann leer bleiben.

Um den Zugriff auf den Seiten-Editor zu beschränken, legen Sie in den Einstellungen auf dem Startbildschirm einen Code zum Verlassen des Players fest.

Tippen Sie auf den **Seiten-Editor** auf dem Startbildschirm, um Kommunikationsseiten zu erstellen und zu bearbeiten. Sind noch keine Bücher angelegt, öffnet sich die erste Seite des Standardbuchs.

Zum Erstellen und Bearbeiten von Nachrichtentasten gibt es zwei Editoren: Schnell-Editor und Klassischer Editor. Standard ist der Schnell-Editor; dies lässt sich in den Einstellungen auf der Startseite ändern. Der Schnell-Editor macht beim Tippen intelligente Vorschläge und bietet eine schlanke Bearbeitung von Nachrichtentasten. Der Klassische Editor ist nötig, um mehrere Bilder auf eine Nachrichtentaste einzufügen und Text und Bilder genau zu positionieren.

Das Hinzufügen einer neuen Seite und die Seitentypen sind in Abschnitt 2.7 beschrieben.

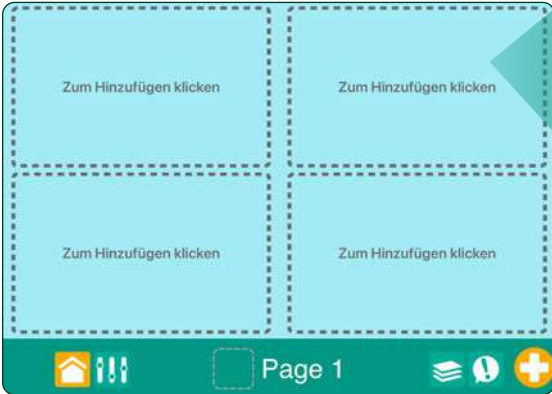


Fig. 2.2 Neue Seite im Editor geöffnet.



Fig. 2.1 Tippen Sie auf die Schaltfläche **Seiten-Editor** auf dem Startbildschirm, um zu beginnen.



Fig. 2.3 Um den Editor für eine einzelne Taste schnell zu wechseln, halten Sie die Taste gedrückt und wählen den Editor aus dem Menü.



Fig. 2.4 Editor-Symboleiste.

2.1 SEITENOPTIONEN

Die Schaltfläche **Seitenoptionen**  steuert Layout und Aussehen einer Kommunikationsseite.

2.1.1 HINTERGRUND: Wählen Sie eine Hintergrundfarbe für die Seite: aus den Farbfeldern oder mit der Farbauswahl.

2.1.2 TASTEN: Wählen Sie die Anzahl der Nachrichtentasten auf dieser Kommunikationsseite: 1, 2, 4, 9, 16, 25, 36 oder 49.

2.1.3 SCAN-SIGNALE: Ist das Scannen aktiviert und die Gruppierung nicht auf Keine gesetzt, lassen sich den Gruppen Hörsignale hinzufügen.

2.1.4 AKTIVIERT: Einschalten, um die Seite ins Buch aufzunehmen und im Player anzuzeigen. Ausschalten, um die Seite im Player auszublenden.

2.1.5 EXPRESS-SEITE: Einschalten, um für diese Seite die Express-Leiste im Player hinzuzufügen. Ausschalten, um die Express-Leiste zu entfernen. Mehr zu Express-Seiten in Abschnitt 3.3.

2.1.6 SEITENSPEZIFISCHES SCANNEN: Einschalten, um die Scan-Gruppen des Buchs für diese Seite zu überschreiben. Dann erscheint eine Gruppenliste; wählen Sie Zeilen, Spalten oder eine andere Gruppierung für diese Seite.

2.1.7 ALTERNATIVES LAYOUT VERWENDEN: Einschalten, um das Rasterlayout an Tastaturschablonen auszurichten. Dann erscheint eine Liste **Layout**; wählen Sie die genaue Bildschirmgröße.

2.1.8 QUIZSEITE (ZUFALL): Einschalten, um die Antworttasten des Quiz bei jedem Öffnen neu zu mischen. (Tasten werden als Quiz-Antworten in **Aktion** festgelegt.)

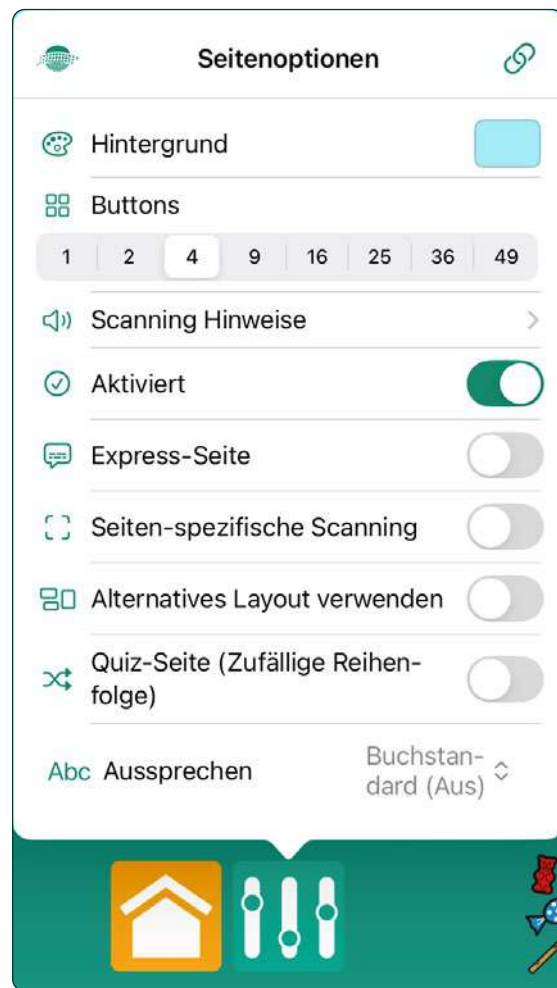


Fig. 2.5 Um die Anzahl der Nachrichtentasten auf dieser Seite zu ändern, wählen Sie die Zahl aus der Liste **Tasten**.

2.1.9 LAUT AUSSPRECHEN: Einschalten, damit bei allen Nachrichtentasten der Text beim Sprechen größer wird. **Laut aussprechen** ist eine Aktionsart zum Üben des Dekodierens und für frühe Lesekompetenz. Beim Tippen im Player wandert das Wort von der Taste zur Bildschirmmitte und wird Segment für Segment vorgelesen, wobei jedes Segment beim Sprechen hervorgehoben wird. Die Animation liegt über der Seite; der Rest wird abgedunkelt, bleibt aber sichtbar.

EINE TASTE FÜR LAUT AUSSPRECHEN EINRICHTEN

So weisen Sie einer Taste Laut aussprechen zu:

1. Öffnen Sie den Schnell-Editor oder Klassischen Editor der Taste.
2. Tippen Sie auf die Aktionsauswahl und wählen Sie **Laut aussprechen**.
3. Unter der Aktionsauswahl erscheint ein Bereich Laut aussprechen mit Einstellungen für Wort, Segmentierung, Tempo und Animation.

EINSTELLUNGEN FÜR LAUT AUSSPRECHEN

Mehrere Einstellungen haben eine Option *Übernehmen*, die den Buchstandard aus den App-Einstellungen verwendet.

Wort: das auszusprechende Wort. Standard ist der Tastentext, lässt sich aber getrennt bearbeiten, wenn die Taste ein Wort zeigen und ein anderes aussprechen soll.

Segmentierung: das Wort erscheint in antippbare Teile zerlegt (etwa wird "teacher" zu "tea" und "cher"). Tippen Sie unter das Feld **Wort**, um den Segmentierungseditor zu öffnen, in dem jeder Buchstabe einzeln antippbar wird und Trenner durch Tippen zwischen Buchstaben hinzugefügt oder entfernt werden. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.



Fig. 2.6 Dies zeigt die Animation, die 'together' per Anlaut-Reim trennt. **Segmentierungsstil** finden Sie in den **Einstellungen** auf dem Startbildschirm.

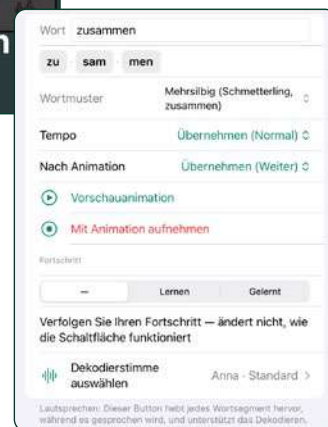


Fig. 2.7 **Laut aussprechen** ist eine Aktionsoption mit Feineinstellungen im Editor. Um zu ändern, wo ein Wort getrennt wird, tippen Sie zwischen die Buchstaben, um eine Trennung hinzuzufügen oder zu entfernen.



Scan-Hörsignale erscheinen nur dann als Seitenoption, wenn vier oder mehr Nachrichtentasten auf der Seite sind.



Wurde der Seite ein Ein-Tasten-Layout zugewiesen, erscheint die **Taste Auto-Aktivieren** als zusätzliche Einstellung in den **Seitenoptionen**. Wenn **Auto-Aktivieren** aktiviert ist, wird die Nachrichtentaste beim Öffnen der Kommunikationsseite automatisch ausgelöst.

Wortmuster: ordnet das Wort einem Lautmuster zu: *Einfach, Beginnt mit Konsonantenverbindung, Endet mit Konsonantenverbindung, Digraph oder Mehrsilbig.*

Tempo: *Übernehmen, Langsam, Normal oder Schnell.*

Nach der Animation: *Übernehmen, Weiter* (schließt die Animation) oder *Auf Tippen warten* (lässt das Wort stehen, bis getippt wird).

Animation-Vorschau: spielt die Animation vor dem Speichern ab.

Mit Animation aufnehmen: spielt die Animation ab und nimmt dabei Audio auf, sodass Sie eine eigene Aufnahme (etwa in der Stimme einer Lehrkraft oder eines Elternteils) statt der Sprachausgabe erfassen können.

Fortschritt: verfolgt den Lernstand als *nicht markiert, Lernt* oder *Gelernt*. Wirkt sich nicht auf das Verhalten der Taste aus.

Dekodierstimme wählen: optional eine TTS-Stimme für diese Taste wählen. Bei Standardstimme wird die TTS-Stimme des Buchs verwendet.

APP-EINSTELLUNGEN FÜR LAUT AUSSPRECHEN

App-Einstellungen, die alle **Laut aussprechen**-Tasten im Buch betreffen, finden Sie unter **Start** > **Einstellungen** > **Laut aussprechen**:

Buchsprache: legt die Sprache für Segmentierung und TTS von Laut aussprechen im Buch fest. Verfügbar sind Englisch, Deutsch und Spanisch.

Segmentierungsart: wie Wörter standardmäßig zerlegt werden. Anlaut-Reim trennt nach dem ersten Konsonanten und dem Rest der Silbe (cat → c / at); Silbe trennt nach Silben.

Tempo: der Buchstandard, wenn Tasten auf Übernehmen stehen. Optionen: *Langsam, Normal* und *Schnell*.

Nach der Animation: der Buchstandard, wenn Tasten gesetzt sind auf *Übernehmen*. Optionen: *Weiter, Auf Tippen warten*.

Auf alle TTS-Tasten anwenden: aktiviert überträgt das Hervorheben-beim-Sprechen von Laut aussprechen auf alle normalen Text-sprechen-Tasten im Buch.

Lesen-Leiste: ändert das Verhalten von Laut-aussprechen-Tasten auf Express-Seiten. *Aus* (Standard): Tasten spielen ihre Überlagerungsanimation, sammeln sich aber nicht in der Express-Leiste. *Ein*: Tasten sammeln sich still in der Express-Leiste; beim Abspielen hebt eine Textleiste jedes Wort synchron zur Sprache hervor und unterstützt so das gemeinsame Lesen selbst gebildeter Sätze. (Mehr zu Express-Seiten in *Abschnitt 3.3*)

Audio-Exportstil: steuert, wie Laut-aussprechen-Audio beim Export auf ein **GoTalk Connect**-Gerät aufbereitet wird. *Taste folgen* verwendet die Einstellungen jeder Taste; *Nur Wort* exportiert ein schlicht gesprochenes Wort ohne Segmentierung; *Erweiterte Mischung* exportiert die volle Folge (Wort, jedes Segment, dann das Wort wiederholt). Mehr zum Export an GoTalk Connect in *Abschnitt 10*.

2.1.10 SYMBOL EXPORT AN GOTALK CONNECT: oben links. Mehr zu Export an **GoTalk Connect** in *Abschnitt 10*.

2.1.11 SYMBOL SEITE TEILEN: oben rechts. Zum Teilen dieser Seite gibt es zwei Optionen. *Link zur Seite* – Erstellt eine URL zum Öffnen dieser Seite, nutzbar auf anderen Seiten dieses Buchs, in anderen GTN-Büchern oder in anderen Attainment-Apps auf diesem Gerät. *Vorlage erstellen* – Erstellt eine Vorlage dieser Seite zum Teilen mit anderen.

2.2 NACHRICHTENTASTEN MIT DEM SCHNELL-EDITOR ERSTELLEN

Der **Schnell-Editor** ist eine schlanke Art, Nachrichtentasten zu bearbeiten. Alle Steuerelemente (Text, Bild, Aktion, Farben, Schriften und Folgeaktion) sind in einem Pop-up vereint, sodass sich die Nachrichtentaste ohne Wechsel zwischen Tabs aufbauen und anpassen lässt.

Der Schnell-Editor ist optional. Die ursprüngliche Oberfläche, nun **Klassischer Editor** genannt, ist weiter verfügbar und in Abschnitt 2.3 beschrieben. Welcher Editor standardmäßig öffnet, wählen Sie in den App-Einstellungen auf dem Startbildschirm. Um für eine einzelne Nachrichtentaste den anderen Editor zu nutzen, halten Sie die Taste gedrückt und wählen den Editor aus dem Menü.

Tippen Sie auf eine Nachrichtentaste, um zu beginnen.

2.2.1 TASTENTEXT UND KI-VORSCHLÄGE: Geben Sie den Nachrichtentext in das Feld *Tastentext* ein. Beim Tippen erscheinen KI-gestützte *Vorschläge* als antippbare Chips unter dem Feld. Tippen Sie einen Vorschlag an, um ihn als Tastentext zu übernehmen.

2.2.2 BILD: Nach Eingabe des Tastentexts zeigt der Bildbereich passende und verwandte Bilder aus den verfügbaren Bibliotheken. Tippen Sie ein Bild an, um es zu wählen. Für ein Bild aus der Fotobibliothek, ein Foto, eine Internetsuche oder weitere Suche in den Bibliotheken tippen Sie auf **Bild festlegen**, um das Bildquellenmenü zu öffnen.

Wählen Sie **Bildbibliotheken verwalten**, um die Suchreihenfolge der Bildbibliotheken festzulegen und zu steuern, welche Bibliotheken in der Liste erscheinen.

Um das Bild einer Taste zu bearbeiten oder zu ersetzen, tippen Sie das Bild (in der rechten Spalte) an, um das Bildbearbeitungsmenü zu öffnen.

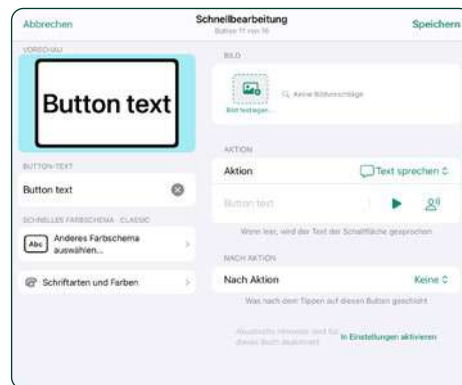


Fig. 2.8 Schnell-Tasteneditor

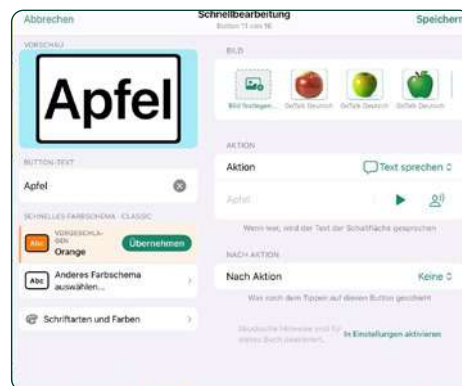


Fig. 2.9 KI-vorgeschlagene Bilder werden angezeigt

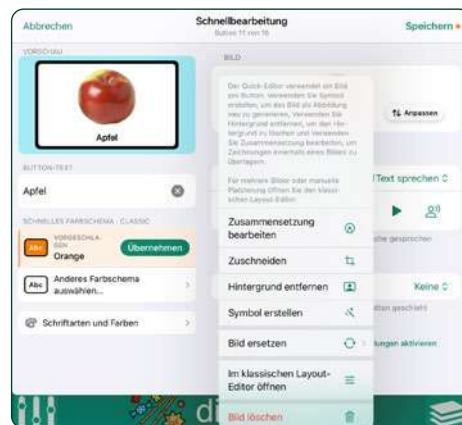


Fig. 2.10 Um das Bild einer Taste zu ändern, tippen Sie das Bild an, um das Bildbearbeitungsmenü zu öffnen.

2.2.3 AKTION: Tippen Sie auf die Auswahl **Aktion**, um festzulegen, was beim Tippen der Nachrichtentaste im Player geschieht.

- **Text sprechen:** spielt den Tastentext per Sprachausgabe ab. Um eine andere Nachricht als den Tastentext abzuspielen, tippen Sie auf den Tastentext unter **Aktion** und geben den abzuspielenden Text ein.
- **Aufgenommenes Audio:** Nachricht aufnehmen oder aus einer Datei importieren.
- **Laut aussprechen:** spricht ein Wort Silbe für Silbe mit Bildschirmanimation. Mehr zu Laut aussprechen, *siehe Abschnitt 2.1.9.*
- **Zu Seite springen:** wechselt zu einer anderen Kommunikationsseite.
- **URL öffnen:** öffnet eine Webseite im iPad-Browser. Geben Sie die URL in die Zeile unter der Aktionsauswahl ein.
- **Video abspielen:** spielt ein Video auf der Nachrichtentaste ab. Das Video kann direkt aufgenommen, aus der iPad-Fotobibliothek gewählt oder aus einer Datei importiert werden.
- **GoVisual:** startet Attainments App GoVisual und öffnet eine gewählte Szene. GoVisual muss dafür auf dem iPad installiert sein.
- **Quiz:** für Quiz-Aktivitäten verwendet (*richtig, falsch, Ergebnisse*).
- **Apple Home-Szene:** steuert HomeKit-kompatibles Smart-Home-Zubehör.
- **Media Player:** spielt einen Titel aus der iPad-Musikbibliothek ab. Verfügbare Aktionen: **Wiedergabe/Pause, Zurück, Weiter, Titel** – zur Auswahl verfügbarer Titel.
- **iClick:** steuert Haushaltsgeräte über den iClick-Controller von Pretorian Technologies.



Fig. 2.11 Menü Tastenaktion.

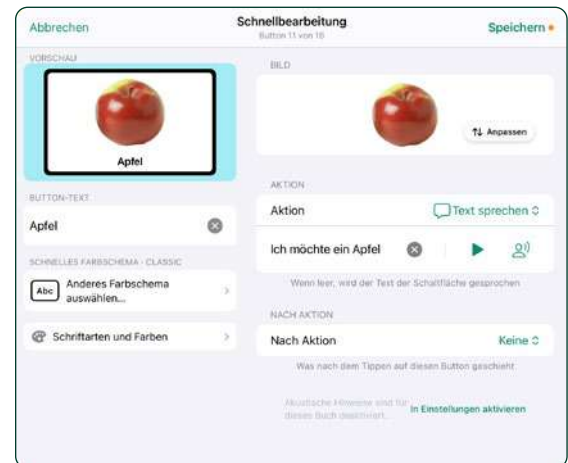


Fig. 2.12 Die **Aktion Text sprechen** nutzt Text-to-Speech und bietet die Möglichkeit, einen anderen Text als den Tastentext zu sprechen.



Sind Hörsignale für das aktuelle Buch ausgeschaltet, erscheint unten im Schnell-Editor ein Link "In Einstellungen aktivieren" für schnellen Zugriff.



Um für eine einzelne Nachrichtentaste den anderen Editor zu nutzen, halten Sie die Taste gedrückt und wählen den gewünschten Editor.



Halten Sie die Taste **Speichern** gedrückt, um weitere Speicheroptionen einzublenden.

2.2.4 FOLGEAKTION: Die **Folgeaktion**-Auswahl legt fest, was nach der Hauptaktion der Taste geschieht. **Folgeaktionen** sind nur verfügbar, wenn die Aktion auf **Text sprechen** oder **Aufgenommenes Audio**.

- **Keine:** keine Folgeaktion (Standard)
- **Weiter:** zur nächsten Seite im Buch
- **Zurück:** zur zuvor angezeigten Seite zurück
- **Springen:** zu einer bestimmten Seite
- **Feiern:** lässt Konfetti über den Bildschirm regnen
- **Wackeln:** animiert die Taste mit einem Wackeleffekt

2.2.5 HÖRSIGNAL: Diese Funktion erscheint nur, wenn Hörsignale in den Einstellungen aktiviert sind. Beim Tippen der Nachrichtentaste wird ein Hörsignal abgespielt. (Tippen Sie die Taste ein zweites Mal, um die Tastennachricht abzuspielen.) Zum Einrichten eines Hörsignals wählen Sie **Text sprechen** und geben den per Sprachausgabe vorzulesenden Text ein, oder wählen Sie **Aufgenommen** und nehmen eine Audiodatei auf oder importieren sie.

2.2.6 SCHNELLES FARBSHEMA: Die Auswahl **Schnelles Farbschema** weist der Nachrichtentaste mit einem Tipp aufeinander abgestimmte Hintergrund-, Rahmen- und Textfarben zu. Zehn Schemata stehen zur Wahl:

- **Klassisch:** schwarzer Rahmen, weißer Hintergrund, schwarzer Text
- **Rahmenlos**
- **Invertiert**
- **Hoher Kontrast**
- **Fette Kontur**
- **5 Fitzgerald Key**-basierte Schemata mit der gängigen AAC-Farbcodierung nach Wortart: Gelb für Personen, Grün für Aktionen, Blau für Beschreibungen, Orange für Nomen und Rosa für soziale Wörter.

Um ein Schema anzuwenden, tippen Sie auf *Anderes Schema wählen...* und wählen aus der Liste. Die Schaltfläche *Smart Recolor* unten rechts prüft jede Taste im gewählten Bereich und bestimmt deren Kategorie.

2.2.7 SCHRIFTEN UND FARBEN: Für mehr Kontrolle öffnen Sie den Bereich **Schriften und Farben**, um Textgröße, Schrift, Stärke und einzelne Farben anzupassen.

Änderungen speichern

Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu übernehmen und den Schnell-Editor zu schließen. Um ohne Verlassen des Editors zwischen Tasten zu wechseln, halten Sie die **Taste Speichern** gedrückt, um weitere Optionen einzublenden:

- **Speichern:** speichern und schließen.
- **Speichern & Zurück:** speichert und öffnet die vorherige Nachrichtentaste der Seite.
- **Speichern & Weiter:** speichert und öffnet die nächste Nachrichtentaste der Seite.
- **Speichern & Klassischen Editor öffnen:** speichert und wechselt zum Klassischen Editor, um mehr Bilder hinzuzufügen und Bilder und Text genauer zu platzieren.

Um Änderungen zu verwerfen, tippen Sie auf **Abbrechen**.

2.3 NACHRICHTENTASTEN MIT DEM KLASSISCHEN EDITOR ERSTELLEN

Nutzen Sie den Klassischen Editor, um mehrere Bilder in eine Nachrichtentaste einzufügen und Text und Bilder genau zu positionieren. Wählen Sie den Standard-Editor in den App-Einstellungen. Um für eine einzelne Taste den anderen Editor zu nutzen, halten Sie die Taste gedrückt und wählen den Editor.

Tippen Sie auf eine Nachrichtentaste, um zu beginnen.

2.3.1 TASTENTEXT TASTE: : Tippen Sie, um die Tastentext-Optionen zu öffnen. Tippen Sie auf das Feld **Text** und geben den anzuzeigenden Text ein. Textgröße, Schriftstil, Farbe und ein Schlagschatten lassen sich ändern.

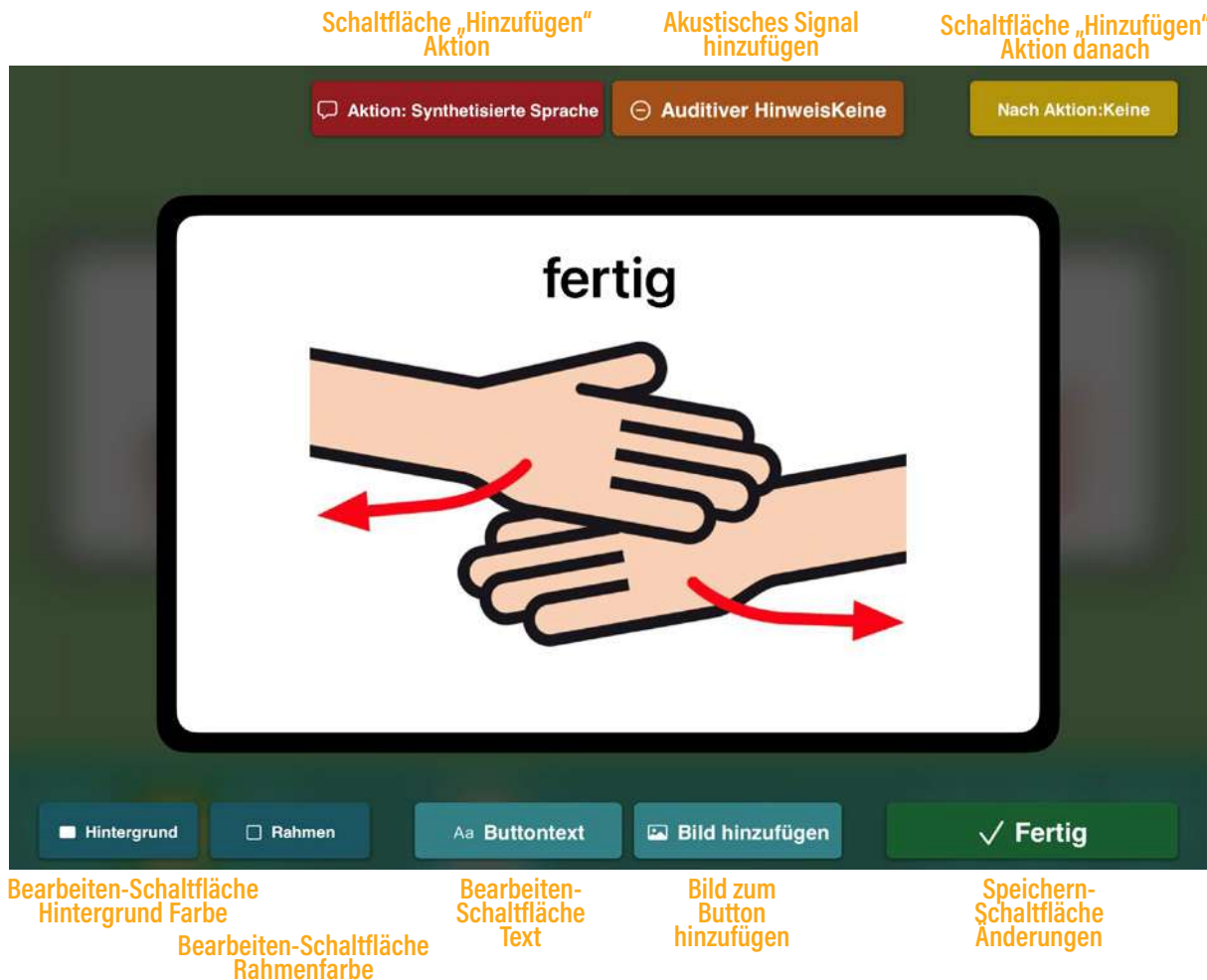


Fig. 2.13 Klassischer Tasten-Editor

2.3.2 AKTION: Tippen Sie auf die Auswahl **Aktion**, um festzulegen, was beim Tippen der Nachrichtentaste im Player geschieht.

- **Text sprechen:** spielt den Tastentext per Sprachausgabe ab.
- **Aufgenommenes Audio:** Nachricht aufnehmen oder aus einer Datei importieren.
- **Laut aussprechen:** spricht ein Wort Silbe für Silbe mit Bildschirmanimation. Mehr zu Laut aussprechen *siehe Abschnitt 2.1.9*.
- **Zu Seite springen:** wechselt zu einer anderen Kommunikationsseite.
- **URL öffnen:** öffnet eine Webseite, geben Sie die URL ein. Optionen: **Extern** - öffnet die Website im iPad-Browser und verlässt **GoTalk NOW** beim Schließen der Seite; **Intern** - öffnet die Website im iPad-Browser und kehrt beim Schließen zu GoTalk NOW zurück; und **Scannen** - Beachten Sie, dass nicht alle Websites mit Tasten-Scanning funktionieren. **YouTube**-Videos starten automatisch und schließen sich am Ende.
- **Video abspielen:** spielt ein Video ab. Das Video kann direkt aufgenommen, aus der iPad-Fotobibliothek gewählt oder aus einer Datei importiert werden.
- **GoVisual:** startet Attainments App **GoVisual** und öffnet eine gewählte Szene. GoVisual muss dafür auf dem iPad installiert sein.

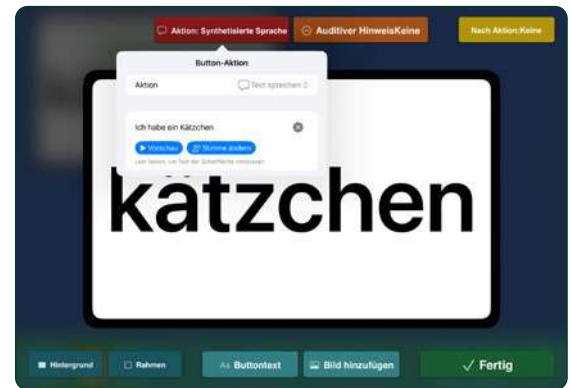


Fig.2.14 Um eine andere Nachricht als den Tastentext abzuspielen, geben Sie den vorzulesenden Text in die Zeile über der Schaltfläche **Vorschau** zu sehen.

- **Quiz:** dient zur Kennzeichnung von **richtig, falsch** oder **Ergebnisse** in einer Quiz-Aktivität.
- **Apple Home-Szene:** steuert HomeKit-kompatibles Smart-Home-Zubehör.
- **Media Player:** spielt einen Titel aus der iPad-Musikbibliothek ab. Verfügbare Aktionen: **Wiedergabe/Pause, Zurück, Weiter, Titel** – zur Auswahl verfügbarer Titel.
- **iClick:** steuert Haushaltsgeräte über den **iClick** -Controller von Pretorian Technologies.

2.3.3 BILD: Bilder erhalten Sie aus der **GoTalk Image Library** (kostenloser Download), der iPad-Fotobibliothek, Foto aufnehmen, Internetsuche, Apple Symbols, Emojis sowie jeder gekauften Bildbibliothek (verfügbar unter **Downloads – Bildbibliotheken**).

Zum Skalieren oder Drehen eines Bildes nutzen Sie Gesten: zwei Finger auf dem Bild zusammenführen, spreizen oder drehen.

2.3.4 FOLGEAKTION: Die **Folgeaktion**-Auswahl legt fest, was nach der Hauptaktion der Taste geschieht. **Folgeaktionen** sind nur verfügbar, wenn die Aktion auf **Text sprechen** oder **Aufgenommenes Audio**.

- **Keine:** keine Folgeaktion (Standard)
- **Zur nächsten Seite:** zur nächsten Seite im Buch
- **Zurück (Verlauf):** zur zuvor angezeigten Seite zurück
- **Feiern:** lässt Konfetti über den Bildschirm regnen
- **Zu bestimmter Seite springen:** eine Buchseite zum Springen wählen

2.3.5 HÖRSIGNAL (FALLS AKTIVIERT): Beim Tippen der Nachrichtentaste wird ein Hörsignal abgespielt. (Tippen Sie die Taste ein zweites Mal, um die Tastennachricht abzuspielen.) Hörsignale werden nur abgespielt, wenn sie in den App-Einstellungen aktiviert sind. Optionen: **Keine, Text sprechen** - den per Sprachausgabe vorzulesenden Text eingeben, **Aufgenommen** - eine Audiodatei aufnehmen oder importieren.

2.3.6 HINTERGRUND: Farbe für den Hintergrund wählen aus **Farbfeldern** oder eine bestimmte Farbe aus **Farbauswahl**.

2.3.7 RAHMEN: Farbe für den Hintergrund wählen aus **Farbfeldern** oder eine bestimmte Farbe aus **Farbauswahl**.

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Fertig**, wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist.

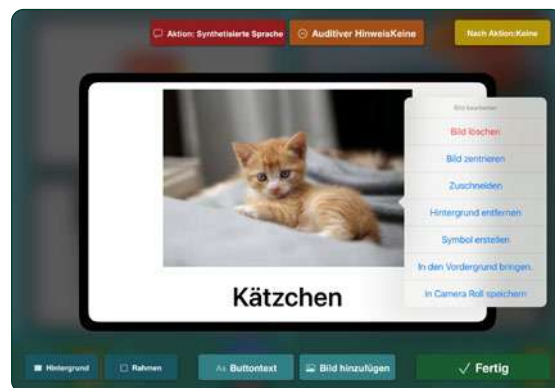


Fig.2.15 Drücken Sie lange auf das Bild, um das Menü „Bild bearbeiten“ zu öffnen.



Fig.2.16 „Symbol erstellen“ im Menü „Bild bearbeiten“ ist eine KI-Funktion, die mit Fotos funktioniert.

 Der Stapeleditor erlaubt die Tastenauswahl nur auf der aktuellen Seite, nicht über mehrere Seiten hinweg.

2.4 TASTEN VERWALTEN

Halten Sie eine Nachrichtentaste gedrückt, um in beiden Editoren weitere Tastenoptionen zu sehen. Für leere Tasten und für Tasten mit gesetzten Eigenschaften werden verschiedene Menüs angezeigt.

Das Gedrückthalten-Menü einer leeren Taste:

Mit Seiten-Assistent füllen, Editor nicht in Verwendung und Stapelbearbeitung.

Das Gedrückthalten-Menü einer Taste mit gesetzten Eigenschaften:

2.4.1 LÖSCHEN: Löscht alle Tasteneigenschaften.

2.4.2 SCHNELL- ODER KLASSISCHER EDITOR:

Der jeweils andere Editor wird aufgeführt. (Der bevorzugte Editor ist eine App-Einstellung.)

2.4.3 UMORDNEN: Tauscht die Position einer Taste mit einer anderen auf dieser Seite oder verschiebt die Taste auf eine andere Seite.

2.4.4 KOPIEREN: Kopiert die ganze Taste oder das Bild dieser Taste. Ist eine Taste kopiert, enthält das Gedrückthalten-Menü einer anderen Taste den Eintrag *Einfügen*.

2.4.5 DEAKTIVIEREN: Deaktiviert wird die Taste im Player aus dem Raster entfernt. Alle gesetzten Eigenschaften bleiben für später erhalten. Im Editor enthält das Gedrückthalten-Menü einer deaktivierten Taste den Eintrag *Einfügen*.

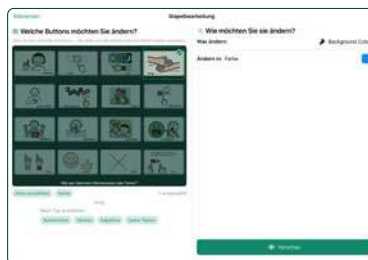


Fig. 2.17 Wählen Sie die Tasten, auf die die Eigenschaftsänderungen der Stapelbearbeitung angewendet werden sollen.

2.4.6 STAPELBEARBEITUNG: Mit der Stapelbearbeitung ändern Sie mehrere Nachrichtentasten einer Seite gleichzeitig. Statt jede Taste einzeln zu bearbeiten, wählen Sie eine Gruppe von Tasten und wenden eine Eigenschaftsänderung an, etwa Rahmenfarben aktualisieren oder Schriften ändern. Diese Funktion gibt es im Schnell-Editor und im Klassischen Editor.

Es gibt drei Wege, die zu ändernden Tasten auszuwählen:

- Einzelne Tasten in der Vorschau antippen, um sie aus- oder abzuwählen.
- Tippen Sie auf den Chip **Alle auswählen**, um jede Taste der Seite zu wählen.
- Über das Feld **Auswählen nach** eine Kategorie wählen. Welche Optionen erscheinen, hängt davon ab, ob Apple Intelligence aktiviert ist. Nach Wahl eines Chips tippen Sie auf **Auswählen**. Eventuell müssen Sie die linke Spalte nach oben scrollen, um die Schaltfläche **Auswählen** zu sehen.

Ausgewählte Tasten zeigen oben rechts ein grünes Häkchen. Tippen Sie auf den Chip **Keine** unter dem Tastenraster, um die Auswahl aufzuheben.

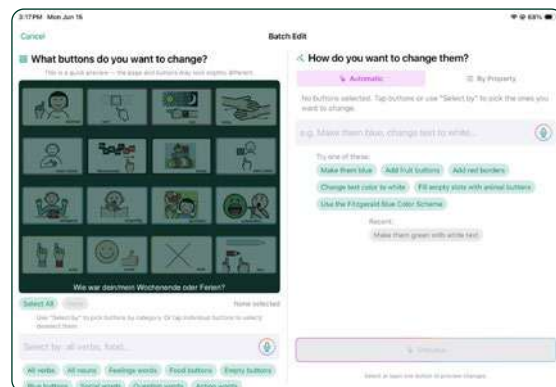


Fig. 2.18 Stapelbearbeitung mit verfügbarer KI-Automatik.

Sind Tasten ausgewählt, legen Sie die Änderungen in der rechten Spalte fest. Bei aktiviertem Apple Intelligence gibt es zwei Modi: *Automatisch*

und *Nach Eigenschaft*. Ohne aktiviertes Apple Intelligence ist nur *Nach Eigenschaft* verfügbar.

Modus Automatisch (Apple Intelligence aktiviert): Beschreiben Sie die Änderungen in einfacher Sprache, getippt oder gesprochen. Zum Beispiel: *"Mach sie blau"* oder *"Verwende das Fitzgerald-Farbschema Blau."* Die KI deutet die Anfrage und wendet die passenden Änderungen an.

Das Feld Automatisch enthält:

- **Probieren Sie eines davon** - Beispiel-Prompts, die zeigen, was möglich ist
- **Zuletzt verwendet** - kürzlich genutzte Prompts zur schnellen Wiederverwendung

Modus Eigenschaft: Wählen Sie eine einzelne zu ändernde Eigenschaft aus dem Dropdown **Was ändern** (tippen Sie die angezeigte Eigenschaft an, um die Liste zu sehen):

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| ▪ Hintergrundfarbe | ▪ Textschatten | ▪ Rahmenstärke |
| ▪ Rahmenfarbe | ▪ Schrift | ▪ Laut aussprechen - die Aktion Laut aussprechen anwenden oder entfernen |
| ▪ Textfarbe | ▪ Aktiviert - nur aktivierte Tasten anzeigen | |
| ▪ Farbschema | ▪ Symbol / Bild | |
| ▪ Tastentext | | |

Das **Ändern in**-Feld zeigt Einstellungen passend zur gewählten Eigenschaft.

Nach Auswahl der Tasten und Festlegen der Änderungen tippen Sie auf **Vorschau**, um das Ergebnis zu prüfen.

Im Vorschaubildschirm:

- Tippen Sie auf **Anwenden**, um die Änderungen zu übernehmen.
- Tippen Sie auf **Zurück**, um zum Stapelbearbeitungs-Bildschirm zurückzukehren und Auswahl oder Änderung anzupassen.
- Tippen Sie auf **Abbrechen**, um ohne Änderungen zu beenden.

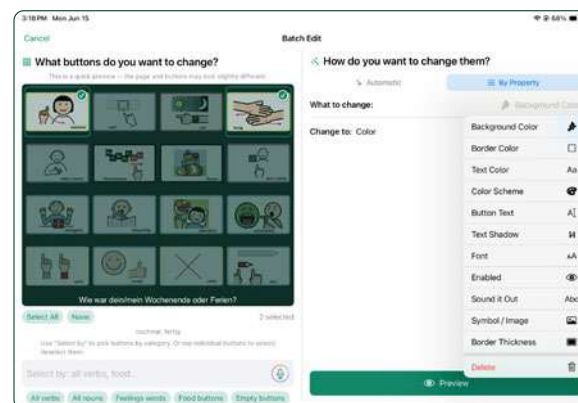


Fig. 2.19 Auf **Hintergrundfarbe** rechts von **Was ändern** getippt, um die Eigenschaftsliste zu sehen.

2.5 SEITENBESCHRIFTUNG

Eine Seitenbeschriftung erscheint unten auf einer Kommunikationsseite. Sie kann einen Seitentitel, ein Seitensymbol und ein Hörsignal enthalten. Standardmäßig dient die Seitenzahl als Seitentitel. Tippen Sie zum Bearbeiten auf den Beschriftungsbereich.

2.5.1 TITEL DER SEITENBESCHRIFTUNG: Tippen Sie auf das Texteingabefeld, um den Seitentitel zu bearbeiten.

2.5.2 SYMBOL DER SEITENBESCHRIFTUNG: Tippen Sie auf die Symbolstelle, um ein zu ersetzen.

2.5.3 HÖRSIGNAL FÜR SEITEN: Tippen Sie auf die Schaltfläche **Hörsignal** zur Auswahl von Sprachausgabe oder aufgenommenem Audio für das Signal. Das Seiten-Hörsignal ertönt beim Öffnen der Seite, sofern Hörsignale in den App-Einstellungen aktiviert sind.

2.5.4 SCHRIFT FESTLEGEN: Tippen Sie auf die **Schrift festlegen**-Taste, um Textgröße und Schriftstil zu ändern.

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Fertig**, wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist.

2.6 SCHNELLTASTEN

Die **Schnellkasten**-Funktion bietet mit einer Taste Zugriff auf vier oder acht Nachrichten, auf allen Seiten eines Kommunikationsbuchs. Ist sie aktiviert, wird eine **Schnellkasten** in der Navigationsleiste platziert. Die Einstellung steht in den App-Einstellungen auf der Startseite: Aktivieren/Deaktivieren, Vier Tasten und Acht Tasten. Tippen Sie auf das Symbol **Schnellkasten**, dann auf eine Nachrichtentaste zum Bearbeiten.

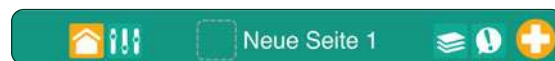


Fig. 2.20 Vom System vergebene Seitenbeschriftung: Seite 1 ohne Symbol.



Fig. 2.21 Das **Seitensymbol**-Feld wurde angetippt und zeigt Bibliotheken zur Bildsuche.

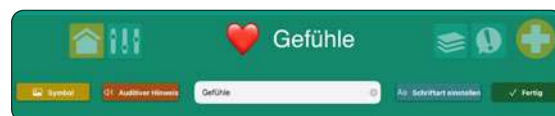


Fig. 2.22 Tippen Sie auf die Schaltfläche **Fertig**, wenn die Bearbeitung der Seitenbeschriftung abgeschlossen ist.



Fig. 2.23 Schnellkasten lassen sich mit vier oder acht Tasten konfigurieren.

2.7 NEUE SEITEN ZU EINEM BUCH HINZUFÜGEN

Um am Buchende eine neue Seite hinzuzufügen, gehen Sie zur letzten Seite und tippen auf die **Taste Hinzufügen**. Alternativ tippen Sie von überall im Buch auf das Symbol **Seiten**, dann auf das + oben im Menü **Seiten**.

Seiten lassen sich auch umordnen; mehr dazu in Abschnitt 2.8 Buchseiten verwalten.

Neue Seite-Menü:

- **Meine Vorlagen:** Fügt fertige Seiten aus Ihrer Vorlagensammlung hinzu. Mehr zu Vorlagen in Abschnitt 7.
- **Online-Galerie:** Fügt fertige Seiten aus der Online-Galerie der Vorlagen hinzu. Mehr zur Online-Galerie in Abschnitt 7.3.
- **Aus einem anderen Buch:** Importiert eine Seite aus einem anderen Buch Ihrer Sammlung.
- **Szenenseiten aus PDF:** Verwendet ein PDF aus Ihren Dateien.
- **Seite duplizieren:** Kopiert eine Seite des Buchs und überarbeitet vorhandene Nachrichtentasten.
- **Seiten-Assistent:** Text hinzufügen und mit wenigen Schritten geführt eine Seite erstellen. Mehr zum Seiten-Assistent in Abschnitt 2.7.1.
- **Tastaturseite:** eine Tastaturseite mit Wortvorhersage und Sprachausgabe.
- **Hybridseite:** Erstellt Hotspot-Kommunikationstasten an beliebiger Stelle eines großen Szenenbildes. Eine Leiste mit vier Nachrichtentasten kann oben, unten, links oder rechts platziert werden.
- **Szenenseite:** Erstellt Hotspot-Kommunikationstasten an beliebiger Stelle eines großen Szenenbildes.
- **Konsistentes Tastenraster:** Ein neues Raster, vorab gefüllt mit Tasten, die auf mindestens 75 % Ihrer Seiten gleicher Rastergröße an derselben Position stehen. (75 % sind einstellbar unter Schwelle für konsistente Tasten in den App-Einstellungen.)
- **Tastenrasterseite:** Ein klassisches Tastenraster.

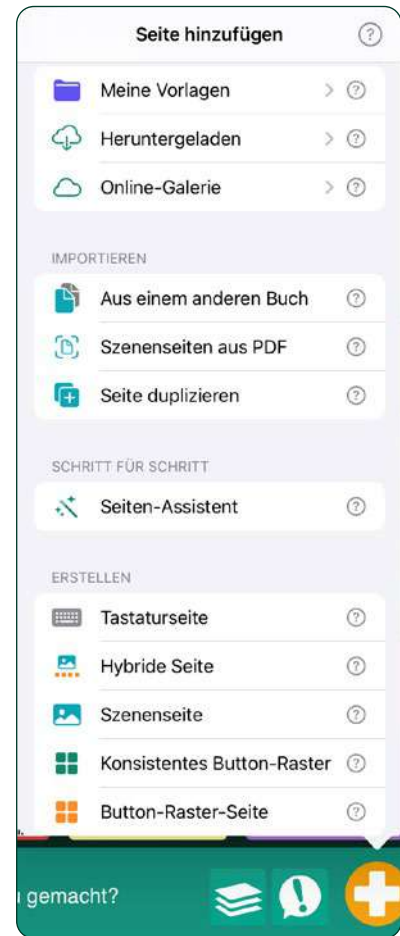


Fig. 2.24 Menü Seite hinzufügen.



Ausfüllbare
Felder reichen
mitunter über
den sichtbaren Bereich
hinaus; Scrollen nach
unten kann nötig sein, um
alle zu sehen.

2.71 SEITEN-ASSISTENT: Der **Seiten-Assistent** ist ein geführter Vorgang zum Erstellen einer neuen Kommunikationsseite. Statt die Seite Taste für Taste aufzubauen, wählen Sie einen Startpunkt, treffen einige Entscheidungen, und der Seiten-Assistent erzeugt die Seite. Öffnen Sie zum Start das Menü **Seite hinzufügen** und wählen **Seiten-Assistent**.

Der **Seiten-Assistent** bietet drei Optionen:

- **Aktivitätstafel:** erzeugt eine Seite zu einer bestimmten Aktivität, etwa einem Rezept, einer Routine oder einem Ausflug. Die Seite enthält Kernvokabular plus aktivitätsspezifische Wörter, jeweils mit passendem Bild.
- **Leer:** beginnt mit einer leeren Rasterseite. Sie wählen die Rastergröße, tippen Ihre Wörter, und der Seiten-Assistent findet passende Bilder.
- **Konsistentes Tastenraster:** erzeugt eine Seite aus den Tasten, die Sie auf Ihren Seiten bereits konsistent verwenden. Praktisch, um Navigationszeilen und Kernwörter buchweit an gleicher Stelle zu halten. Funktioniert am besten bei einem Buch mit mehreren Seiten, da diese auf wiederkehrende Tasten geprüft werden.

AKTIVITÄTSTAFEL

Wählen Sie die **Aktivitätstafel** aus, um den **Aktivitätshelfer**.

Tafelstil wählen

Wählen Sie Stil und Aufbau der erzeugten Seite. Acht Stile stehen zur Wahl, von einer 4-Tasten-Schnelltafel bis zur 49-Tasten-Volltafel, plus zwei mehrseitige Optionen (Topic Explorer und Topic Book) zum Verteilen des Vokabulars über mehrere Seiten.

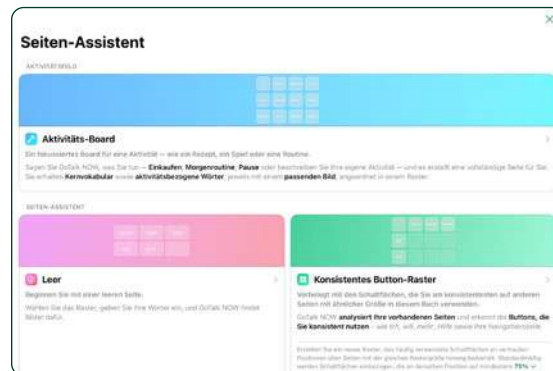


Fig. 2.25 Seiten-Assistent: Wählen Sie den zu erstellenden Seitentyp.

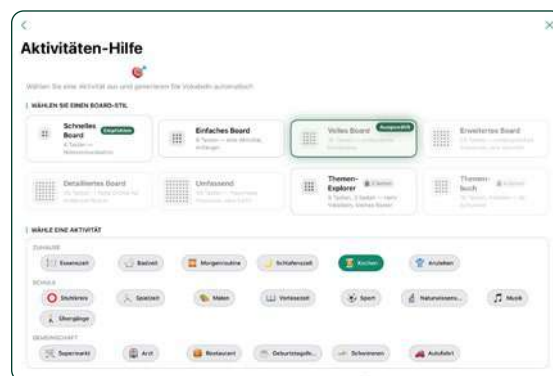


Fig. 2.26 Volle Tafel wurde als Tafelstil gewählt.

Aktivität wählen

Wählen Sie aus voreingestellten Aktivitäten nach Umgebung: Zuhause, Schule und Gemeinde.

Bei aktiviertem Apple Intelligence wird zusätzlich ein Textfeld *“Beliebige Aktivität beschreiben”* unter den voreingestellten Aktivitäten angeboten. Geben Sie eine Beschreibung ein, etwa *“ein Ausflug ins Aquarium”* oder *“Pfannkuchen machen”*, und der Seiten-Assistent erzeugt eine passende Aktivitätstafel dafür.

Scrollen Sie nach unten für weitere Optionen.

Express-Satzleiste: fügt eingeschaltet oben auf jeder erzeugten Seite eine Express-Leiste hinzu.

Tastentext in Großschreibung: Wenn ein, wird jedes Wort großgeschrieben.

Bildbibliotheken: Zeigt die derzeit für den Bildabgleich aktiven Bildbibliotheken. Tippen Sie auf Bildbibliotheken verwalten, um Bibliotheken hinzuzufügen, zu entfernen oder ihre Suchreihenfolge zu ändern.

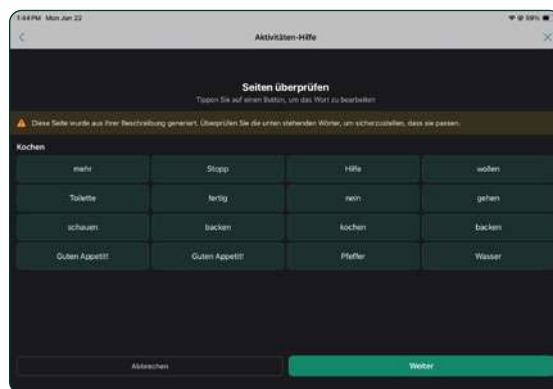


Fig. 2.28 Tippen Sie eine Taste an, um ihren Text zu bearbeiten.

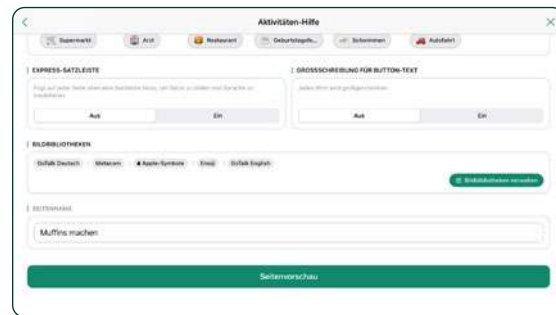


Fig. 2.27 Zur Beschreibung dieser Aktivität wurde Pfannkuchen machen eingegeben.

Seitenname: Ein Vorschlag wird eingefügt, der sich ändern lässt.

Tippen Sie auf **Seitenvorschau**, um die Aktivitätstafel zu erzeugen und das Ergebnis zu prüfen.

Im Bildschirm Seiten prüfen eine beliebige Taste an, um den Text zu bearbeiten. Ein Textfeld öffnet sich zum Bearbeiten des Tastentexts.

Bei mehrseitigen Tafelstilen wie Topic Explorer oder Topic Book erscheinen alle Seiten gemeinsam im Prüfbildschirm, jeweils mit dem Seitentitel über dem Raster. Während der Prüfung haben die Zu Seite springen-Tasten, die Seiten verbinden, eine andere Hintergrundfarbe als normale Vokabeltasten.

- Tippen Sie auf **Weiter**, um zum nächsten Bearbeitungsbildschirm zu gelangen, wo Tasten umgeordnet und Texte erneut geändert werden können.
- Tippen Sie auf **Abbrechen**, um ohne Hinzufügen der Seiten zu beenden.

Bei aktiviertem Apple Intelligence erscheint oben am Bildschirm die Option Seite vorschlagen. Tippen Sie darauf und beschreiben Sie die gewünschte Seite in einfacher Sprache. Zum Beispiel "Dinge, die ich im Park sehe" oder "Frühstücksauswahl", und die KI füllt die Tastentextfelder darunter vor. Sie können die Vorschläge vor dem Erzeugen der Seite bearbeiten.

Tasten lassen sich verschieben, indem Sie die drei Linien gedrückt halten und die Taste an die neue Position ziehen.

Tippen Sie die drei Punkte einer Taste an, um diese weiteren Optionen zu sehen:

- **Taste bearbeiten:** den Text bearbeiten.
- **In Kategorie verschieben:** das Farbschema der Taste anpassen.
- **Auf andere Seite verschieben:** verschiebt die Taste auf eine andere Seite der Aktivitätstafel.
- **Taste leeren:** löscht den Tastentext.

Tippen Sie auf **Weiter**, um zum nächsten Bearbeitungsbildschirm zu gelangen, wo Sie Bilder ersetzen können.

Um ein Bild zu ersetzen, tippen Sie auf das Symbol **Weitere Optionen** (Kreis mit drei Punkten) neben dem Bild. Wählen Sie, wo nach einem Ersatzbild gesucht wird: Internet, GoTalk Image Library, jede zusätzlich geladene Symbolbibliothek, Fotobibliothek oder Foto aufnehmen.

Scrollen Sie die Bildliste nach unten, um alle erzeugten Tasten und Seiten zu prüfen.

Tippen Sie auf **Weiter**, um die Aktivitätstafel zu erstellen. Die neue(n) Seite(n) öffnen sich im Editor für schnelle weitere Anpassungen.

LEERE RASTERSEITE

Seite vorschlagen

Bei aktiviertem Apple Intelligence können Sie Tastentext per Texteingabe erzeugen.



Fig.2.29 Tippen Sie die drei Punkte auf einer Taste an, um das Bearbeitungs Menü zu zeigen.

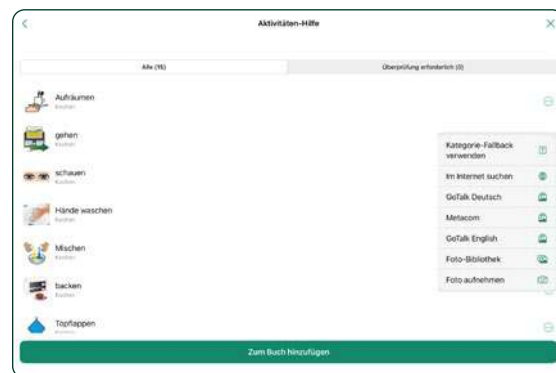


Fig.2.30 Auf das Symbol **Weitere Optionen** getippt, um das Bild *Hände waschen* zu ersetzen.

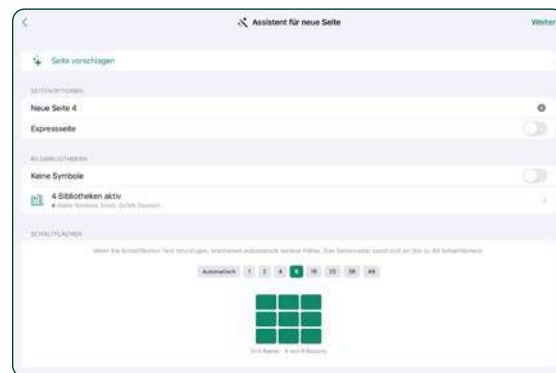


Fig.2.31 Als Seitentitel wurde Frühstücksauswahl eingegeben.

Seitenoptionen

Seitentitel: standardmäßig die nächste freie Seitenzahl. Tippen Sie das Feld zum Umbenennen an oder tippen Sie auf **X**, um es zu leeren.

Express-Seite: fügt eingeschaltet die Express-Leiste zur Seite hinzu.

Keine Symbole: fügt eingeschaltet den erzeugten Seiten keine Bilder hinzu.

Aktive Bildbibliotheken: Zeigt die derzeit für den Bildabgleich aktiven Bildbibliotheken.

Tasten: Verwenden Sie **Auto** oder wählen Sie die Tastenanzahl der Seite. Ist **Auto** gewählt, erscheinen automatisch weitere Textfelder, sobald Tastentext hinzugefügt wird.

Scrollen Sie nach unten für weitere Optionen.

Farben: Wählen Sie, wie Tastenfarben auf die neue Seite angewendet werden:

- **Zuletzt verwendet** - übernimmt die Farben der zuletzt bearbeiteten Taste.
- **Einzelschema** - wendet eines der benannten Farbschemata an. Tippen Sie auf Schema wählen, um die Optionen zu sehen oder ein neues Schema hinzuzufügen.
- **Voreinstellungen** - bietet Varianten der Fitzgerald-Key-Farbcodierung. Tippen Sie auf Farbbrollen bearbeiten, um ein Thema zu wählen.

Tastentext: Geben Sie Tastentext in die Zeilen mit *Tastentext hier eingeben*. Zum Umdrehen der Tasten nutzen Sie die Pfeile nach oben und unten rechts in jeder Zeile.

Tippen Sie auf **Weiter** oben rechts, wenn die Tastentexteingabe fertig ist.

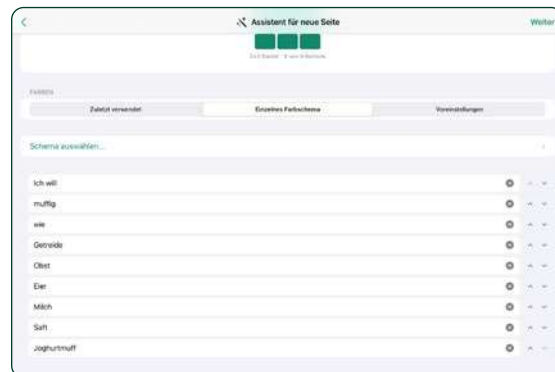


Fig. 2.32 Eingetragener Tastentext beim Einrichten einer **Leeren Seite**.

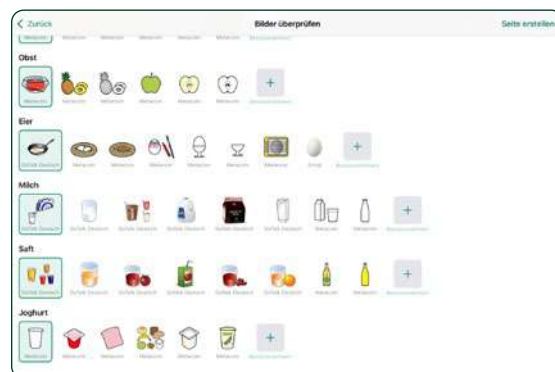


Fig. 2.33 Prüfen Sie die vorgeschlagenen Bilder.



Fig. 2.34 Die neue Seite öffnet sich im Editor für schnelle weitere Anpassungen.

Dies öffnet eine Seite zur Prüfung der vorausgewählten Bilder. Um ein Bild zu ändern, wählen Sie ein anderes gezeigtes Bild oder tippen auf **Eigenes**, um ein anderes Bild zu finden.

Tippen Sie auf **Seite erstellen**, um die Seite zum Buch hinzuzufügen.

KONSISTENTES TASTENRASTER

Die **Konsistentes Tastenraster** -Option erzeugt eine Seite aus den Tasten, die auf Ihren Seiten bereits konsistent erscheinen. Funktioniert am besten bei einem Buch mit mehreren Seiten.

Der Seiten-Assistent analysiert Ihre Seiten und findet Tasten, die auf mindestens 75 % der Seiten gleicher Rastergröße an derselben Position stehen. Diese Tasten werden auf der neuen Seite vorplatziert; das übrige Raster bleibt zum Ausfüllen leer. Die Rastergröße ist an Ihre aktuellen Seiten gebunden, und vorplatzierte Tasten lassen sich im Seiten-Assistenten nicht bearbeiten; das geht später im **Seiten-Editor**.

Hat das Buch nicht genug Seiten oder nicht genug Tasten in konsistenten Positionen für die Schwelle, erscheint der Einrichtungsbildschirm mit allen Positionen leer. Senken Sie die Schwelle oder bauen Sie mehr Seiten mit gemeinsamen Tasten, um Vorplatzierungen zu erhalten.

Die Schwelle von 75 % ist Standard, lässt sich aber von 50 % bis 100 % einstellen. Eine höhere Schwelle ist strenger; eine niedrigere platziert mehr Tasten mit geringerer Konsistenzsicherheit vor. Zum Anpassen gehen Sie zu den Einstellungen auf dem Startbildschirm und wählen **Schwelle für konsistente Tasten**. Tippen Sie auf 75 %, um einen anderen Wert zu sehen und zu wählen.

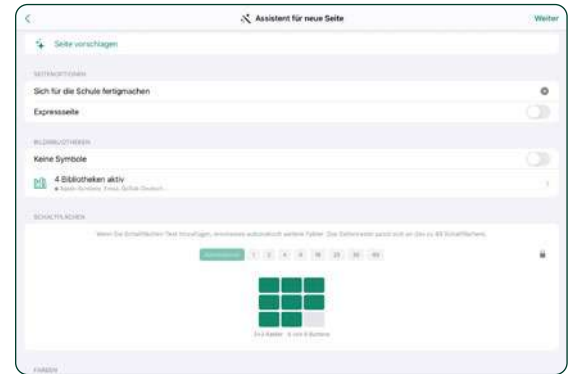


Fig.2.35 Erstellen von 'Getting ready for school' bei der Einrichtung **Konsistente Seite**.

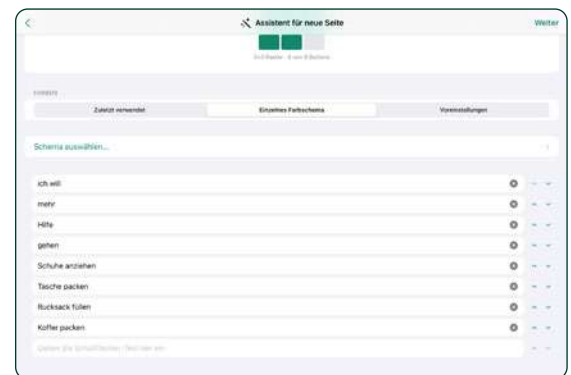


Fig.2.36 Der Tastentext wurde aus vorhandenen Buchseiten erzeugt mit **Konsistente Seite**.

Seitentitel: standardmäßig die nächste freie Seitenzahl. Tippen Sie das Feld zum Umbenennen an oder tippen Sie auf X, um es zu leeren.

Express-Seite: fügt eingeschaltet die Kommunikationsleiste der Express-Seite zur Seite hinzu.

Keine Symbole: fügt eingeschaltet den erzeugten Seiten keine Bilder hinzu.

Aktive Bildbibliotheken: Zeigt die derzeit für den Bildabgleich aktiven Bildbibliotheken. Tippen Sie auf *Bildbibliotheken verwalten*, um Bibliotheken hinzuzufügen, zu entfernen oder ihre Suchreihenfolge zu ändern.

Tasten: Die Tastenanzahl der Seite entspricht der Seitenanzahl des Buchs.

Scrollen Sie nach unten für weitere Optionen.

Farben: Wählen Sie, wie Tastenfarben auf die neue Seite angewendet werden:

- **Zuletzt verwendet** - übernimmt die Farben der zuletzt bearbeiteten Taste.
- **Einzelschema** - wendet eines der benannten Farbschemata an. Tippen Sie auf Schema wählen, um die Optionen zu sehen oder ein neues Schema hinzuzufügen.
- **Vorgeschlagen** - bietet Varianten der Fitzgerald-Key-Farbcodierung. Tippen Sie auf Farbbrollen bearbeiten, um sie zu ändern, inklusive Pastell-, Kräftig- und rahmenlosen Stilen.

Tastentext: Tastentext wird aus vorhandenen Seiten erzeugt. Für den eingegebenen Titel gibt es weitere, bearbeitbare Vorschläge. Zum Umordnen der Tasten nutzen Sie die Pfeile nach oben und unten rechts in jeder Zeile.

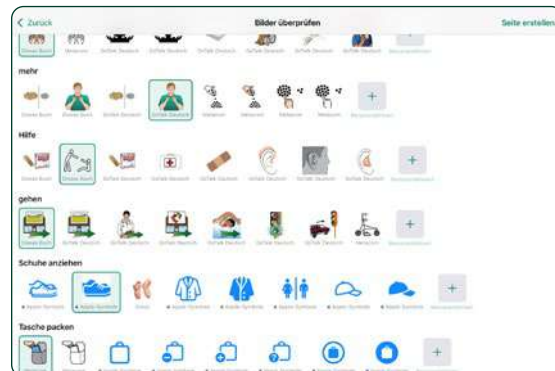


Fig.2.37 Prüfen Sie die Bilder, die den neuen von Ihnen hinzugefügten Wörtern zugewiesen wurden.

Tippen Sie auf **Seite erstellen** oben rechts, wenn Sie fertig sind, um die Seite zu erzeugen. Die neue Seite öffnet sich im Editor für schnelle weitere Anpassungen.

2.7.2 SZENEN- UND HYBRIDSEITE: Szenen- und Hybridseiten sind Alternativen zu Rasterseiten. Sie zeigen ein großes Bild mit berührungsempfindlichen Hotspots. Diese Hotspots können dieselben **Aktionen** und **Folgeaktionen** wie Nachrichtentasten haben.

Eine Hybridseite hat eine Reihe von vier Nachrichtentasten. Deren Position lässt sich an den linken, rechten, oberen oder unteren Seitenrand legen. Die Position wird in den **Seitenoptionen - Ausrichtung**.



Fig.2.38 Hybridseite mit Hotspots

1. Zum Erstellen wählen Sie **Szenenseite** oder **Hybridseite** aus dem Menü **Seite hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf die **Bildsymbol**-Taste unten rechts, um das Szenenbild festzulegen. Wählen Sie ein Bild aus den verfügbaren Bildbibliotheken, der Fotobibliothek, per Foto aufnehmen oder Internetsuche. Für das Szenenbild ist nur ein Bild möglich.
 - a. Ziehen oder zoomen Sie das Bild, um Größe und Position auf der Seite anzupassen.
 - b. Wählen Sie **Komposition bearbeiten**, um Zeichenwerkzeuge für weitere Bildanpassungen zu öffnen.
3. Um das Bild auf der Seite zu fixieren, tippen Sie erneut auf die Taste, dann auf **Bild sperren**, damit sich das Bild beim Hinzufügen von Hotspots nicht verschiebt.
4. Um einen Hotspot hinzuzufügen, tippen Sie auf die Taste  unten links im Bild. Ziehen oder zoomen Sie den Hotspot, um Größe und Position im Bild anzupassen.
5. Tippen Sie den Hotspot an, um Aktion, Hörsignal oder Folgeaktion hinzuzufügen, die Position zu sperren, zu deaktivieren oder den Hotspot zu löschen. Bis zu 25 Hotspots sind möglich.

Personen auf Fotos erkennen

GoTalk NOW kann bestimmte Personen auf Fotos erkennen, die Sie als Hintergrund für Szenen- und Hybridseiten verwenden. Ist eine Person mit mehreren Referenzfotos angelegt, erkennt die App sie in jedem neuen Szenenseiten-Hintergrund und platziert automatisch einen Hotspot um sie. Das hilft beim Erstellen von Szenenseiten mit Familienmitgliedern, Mitschülern oder Betreuern, ohne jeden Hotspot manuell zu setzen.

Diese Funktion nutzt Gesichtserkennung auf dem Gerät; keine Fotos oder Erkennungsdaten verlassen das iPad.

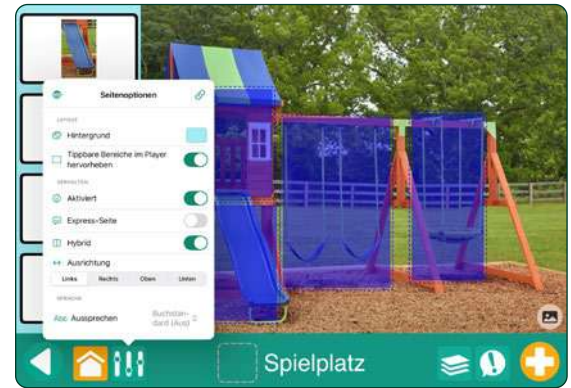


Fig. 2.39 Hybrid-Seite – Seitenoptionen

Datenschutzhinweis beim ersten Mal

Wenn Sie das Symbol Personen verwalten zum ersten Mal antippen, erscheint ein

Datenschutzhinweis zur Gesichtserkennung.

Der Hinweis umfasst:

- Die Erkennung erfolgt auf dem Gerät. Keine Fotos oder biometrischen Daten werden an einen Server gesendet.
- Gesichtserkennungsdaten werden nur lokal auf dem iPad gespeichert.
- Mit dem Hinzufügen von Fotos bestätigen Sie, dass Sie sie für die Gesichtserkennung verwenden dürfen.
- Das Hinzufügen von Fotos von Personen unter 13 erfordert die Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten.
- Die Daten einer Person können jederzeit gelöscht werden.
- Lokale Gesetze können zusätzliche Einwilligungen oder Hinweise verlangen; stellen Sie die Einhaltung der Vorschriften in Ihrem Rechtsraum sicher.

Tippen Sie auf **Ich verstehe & stimme zu**, um die Funktion zu aktivieren, oder **Nicht jetzt**, um den Hinweis ohne Aktivierung zu schließen. Nach Zustimmung erscheint der Hinweis nicht erneut.



Oben im
Bildschirm
Person
hinzufügen wird der
Datenschutzhinweis
wiederholt. Für Personen
unter 13 ist die Zustimmung
der Eltern erforderlich.

Eine Person hinzufügen

So fügen Sie eine Person zur Erkennungsliste hinzu:

1. Tippen Sie auf **Personen verwalten** oben im Dropdown, um den Personen-Bildschirm zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das **+** Symbol oben rechts, um den Bildschirm Person hinzufügen zu öffnen.
3. Im Bildschirm **Person hinzufügen**:
 - Geben Sie den **Namen**.
 - Tippen Sie auf **Fotos auswählen**, um Fotos aus der iPad-Fotobibliothek zu wählen.

Für beste Erkennung empfiehlt der Bildschirm:

- Mindestens 3 Fotos der Person
- Fotos aus verschiedenen Winkeln
- Wechselnde Lichtverhältnisse
- Fotos mit und ohne Brille, falls zutreffend
- Klare, scharfe Fotos

Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Sie fertig sind. Die Person wird zur Personenliste hinzugefügt und steht nun zur Erkennung auf Szenen- und Hybridseiten bereit.

Der Personen-Bildschirm

Der Personen-Bildschirm listet alle gespeicherten Personen und bietet Werkzeuge zu ihrer Verwaltung.

Der Bildschirm enthält:

- Ein **Suchfeld** zum Filtern der Liste nach Namen.
- Ein **Unbekannte Personen entdecken**-Schalter. Aktiviert analysiert die App die Hintergrundbilder der Szenenseite und markiert unbekannte Gesichter, damit Sie sie benennen und speichern.
- Eine Liste gespeicherter Personen, jeweils mit Namen, Foto-Miniatur und Anzahl der hinterlegten Referenzfotos.



Fig. 240 Das **Personen verwalten**-Menü, geöffnet durch Tippen auf das Personensymbol auf der Szenenseite.

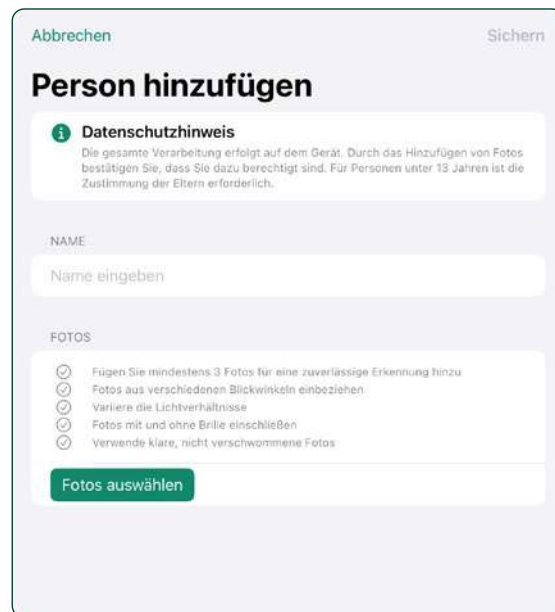


Fig. 241 **Person hinzufügen**.

- Ein **+** Symbol (oben rechts), um eine neue Person hinzuzufügen.
- **Fertig** (oben links), um den Bildschirm zu schließen.



Das Löschen
einer Person
entfernt ihre

Fotos und
Erkennungsdaten
dauerhaft vom iPad.

Eine gespeicherte Person verwalten

Tippen Sie eine Person aus der Liste an, öffnet sich ihre Detailansicht, in der Sie Fotos und Erkennungseinstellungen aktualisieren.

Die Detailansicht enthält:

- **Namen:** den Namen der Person bearbeiten.
- **Fotos:** die für die Erkennung genutzten Referenzfotos. Tippen Sie auf **Fotos hinzufügen**, um weitere hinzuzufügen, oder tippen Sie auf das rote X auf einem Foto, um es zu entfernen.
- **Abgelehnte Gesichter:** Gesichter, die ausdrücklich als nicht diese Person markiert wurden. Solche Einträge helfen, künftige Fehltreffer zu vermeiden.
- **Erweitert:** Optionen zur Feinabstimmung der Erkennung für genau diese Person.
- Ein **Papierkorb**-Symbol (oben rechts), um die Person und alle ihre Daten zu löschen.



Fig. 2.42 Gespeicherte Person.

Personen auf einer Szenenseite erkennen

Sind Personen hinzugefügt, pulsiert das Symbol **Personen verwalten** im Szenenseiten-Editor, wenn eine oder mehrere gespeicherte Personen im aktuellen Hintergrundbild erkannt werden. Tippen Sie das Symbol an, um das Dropdown zu öffnen.

Das Dropdown listet:

- **Personen verwalten:** öffnet den vollständigen Personen-Bildschirm.
- **Erkannte Personen:** Namen und Miniaturen aller gespeicherten Personen, die die App im aktuellen Bild erkannt hat.

Tippen Sie einen Namen in der Liste **Erkannte Personen** an, um automatisch einen Hotspot um diese Person im Hintergrundbild zu setzen.



Fig. 2.43 Sobald eine Person hinzugefügt wurde, lässt sich ihr Miniaturbild antippen, um einen Hotspot um sie zu platzieren.

Einen automatisch gesetzten Hotspot bearbeiten

Von der Personenerkennung gesetzte Hotspots verhalten sich wie manuell gesetzte. Tippen Sie einen Hotspot an, um sein Aktionsmenü zu öffnen.

Bei automatisch gesetzten Hotspots enthält das Aktionsmenü zusätzliche Optionen zur Verwaltung der Erkennung:

- **Leeren Hotspot hinzufügen:** fügt nahe der getippten Stelle einen neuen leeren Hotspot hinzu.
- **Hotspot hinzufügen mit Text...:** öffnet ein Untermenü, um schnell einen Hotspot mit einer bestimmten Sprachausgabe-Nachricht hinzuzufügen.
- **Das ist eigentlich...:** öffnet eine Liste, um den Hotspot einer anderen gespeicherten Person zuzuweisen.
- **Das ist nicht [Name] (rot):** bestätigt eine falsche Erkennung. Das Gesicht wird zur Liste Abgelehnte Gesichter dieser Person hinzugefügt, um denselben Fehltreffer künftig zu vermeiden.
- **Auf dieser Seite ignorieren:** unterdrückt den Hotspot nur für die aktuelle Szenenseite. Auf anderen Seiten wird das Gesicht weiter erkannt.



Fig.244 Tippen Sie einen Hotspot an, um sein Aktionsmenü zu sehen.

2.8 BUCHSEITEN VERWALTEN

Um die Seiten in Buch oder Vorlage zu löschen oder umzuordnen, tippen Sie im **Editor** auf die Schaltfläche **Seiten**, dann auf **Bearbeiten** oben rechts. Um eine Seite zu löschen, tippen Sie auf den roten Kreis, dann auf das Papierkorbsymbol. Die aktuell geöffnete Seite kann nicht gelöscht werden. Zum Umordnen halten Sie die drei Balken und ziehen die Seite an die neue Position. Zum alphabetischen Sortieren tippen Sie auf die Pfeile nach oben und unten oben rechts.

Eine schnelle Alternative zum Löschen oder Kopieren einer Seite: Tippen Sie auf die Schaltfläche **Seiten**, wischen Sie die Seite nach links und tippen auf das **Papierkorb**-Symbol. Zum Kopieren wischen Sie die Seite nach rechts und tippen auf das **Kopieren**-Symbol.

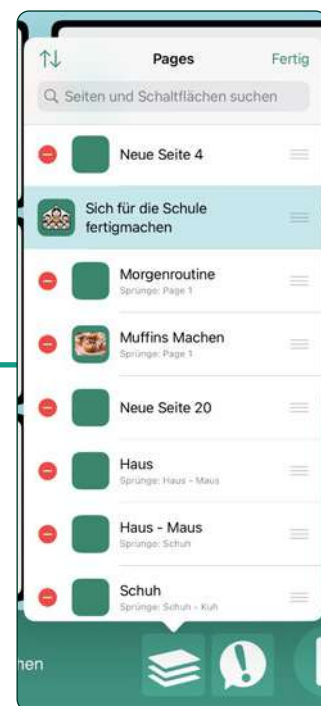


Fig.245 Ansicht Seiten bearbeiten. Beachten Sie, dass die aktuell geöffnete Seite nicht gelöscht werden kann.



Um den **Player** zu verlassen, wischen Sie mit zwei Fingern auf dem iPad-Bildschirm nach unten oder halten Sie die Start-Taste acht Sekunden gedrückt. In den Einstellungen lässt sich ein vierstelliges Passwort zum Verlassen des Players festlegen.

Sobald ein Kommunikationsbuch erstellt ist, tippen Sie auf die **Player**-Taste auf dem Startbildschirm. Das gewählte Kommunikationsbuch wird geöffnet. Tippen Sie auf die Nachrichtentasten auf der Seite, um zugewiesene Aktionen auszuwählen und abzuspielen.

Der Buchtitel wird unten auf dem Startbildschirm angezeigt. Es lassen sich mehrere Bücher erstellen. Sind mehrere Bücher vorhanden, tippen Sie unten auf dem Startbildschirm auf den Buchtitel, um die Liste zu sehen. Um ein anderes Buch zu verwenden, wählen Sie es aus der Liste. Wenn Sie **GoTalk NOW LITE** oder **GoTalk Start** verwenden, ist nur ein Kommunikationsbuch verfügbar.

3.1 NAVIGATIONSLEISTE DES PLAYERS

Eine Navigationsleiste erscheint unten am **Player-Bildschirm**. Steuern Sie in den App-Einstellungen, welche Navigationstasten erscheinen.

- **Zurück** und **Weiter** sind die Navigationstasten zum Blättern durch die Seiten.
- Tippen Sie auf die **Start**-Taste, um zur ersten Seite des Buchs zurückzukehren. Halten Sie die Start-Taste acht Sekunden gedrückt, um zum Startbildschirm der App zurückzukehren.
- Tippen Sie auf die **Zurück**-Taste, um zur zuvor angezeigten Seite zurückzukehren.
- Tippen Sie auf die **Springen zu**-Taste, um eine Liste verfügbarer Seiten zu öffnen, dann tippen Sie eine Seite an, um dorthin zu gelangen.




Fig. 3.1 Tippen Sie auf die Schaltfläche Player auf dem Startbildschirm.



Fig. 3.2 Eine Rasterseite mit vier Tasten im Player.

- Tippen Sie auf die **Schnellstasten**-Taste, um die Schnellstasten-Nachrichten zu nutzen. Mehr zum Hinzufügen von Schnellstasten-Nachrichten zu einem Buch in *Abschnitt 2.6*.

Fig. 3.3 Player-Navigationsleiste.

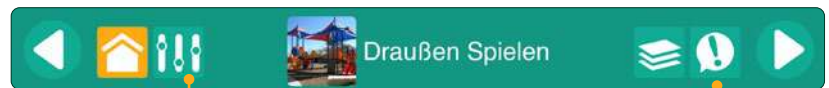

Vorherige Seite

27

Einstellungen
Seitenoptionen

Seitensymbol

Seitenbezeichnung

Springen zu

Schnellzugriffstasten

Nächste Seite

3.2 TASTATURSEITEN VERWENDEN

Tastaturseiten lassen fortgeschrittene Nutzer Nachrichten über eine Bildschirmtastatur tippen, sie per Sprachausgabe anhören und später wiederverwenden. Sie eignen sich für Kommunizierende, die buchstabieren oder lesen können und jede Nachricht frei verfassen wollen, statt nur auf vorgefertigte Tasten zurückzugreifen.

Eine Tastaturseite im Player besteht aus drei Hauptbereichen: Express-Leiste, Vorhersagezeile und Tastatur.

1. **Express-Leiste.** Die Leiste oben am Bildschirm zeigt die Nachricht beim Tippen. Tippen Sie irgendwo auf die Express-Leiste, um die aktuelle Nachricht per Sprachausgabe abzuspielen. Rechts der Express-Leiste sind zwei Tasten:
 - **Korrigieren** (Taste mit Zauberstab): bereinigt Rechtschreibung und Grammatik der aktuellen Nachricht.
 - **Aktionsmenü** (Taste mit drei Punkten): öffnet das Aktionsmenü zur Arbeit mit der Nachricht.

Tippen Sie auf das Aktionen-Menü (Taste mit drei Punkten) rechts der Express-Leiste. Wählen Sie die Taste Aktionen, Korrigieren oder Schließen. Neun Aktionen stehen zur Wahl:

- **Leeren:** leert die Express-Leiste.
- **Kopieren:** kopiert den Text der Express-Leiste in die iPad-Zwischenablage.
- **Teilen:** öffnet das iOS-Teilen-Menü, um den Text per E-Mail, Nachricht oder anderer App zu senden.

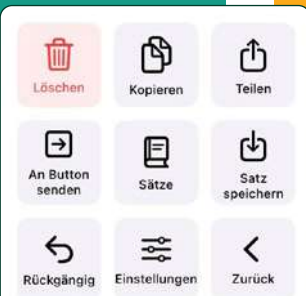


Fig. 3.5 Das Tastaturmenü „Aktionen“.



Fig. 3.4 Tastaturseite im Player.

- **An Taste senden:** wandelt die aktuelle Nachricht der Express-Leiste in eine Nachrichtentaste um. Die App fragt, welcher Seite des aktuellen Kommunikationsbuchs die neue Taste hinzugefügt wird.
- **Phrasen:** öffnet den gespeicherten Phrasen-Ordner. Der Phrasen-Ordner speichert mit Phrase speichern gesicherte Nachrichten zur schnellen Wiederverwendung. Nach dem Speichern wird eine Phrasenordner-Taste in der untersten Tastaturzeile platziert. Wird eine gespeicherte Phrase aus dem Ordner gewählt, spielt sie direkt per Sprachausgabe, ohne zuerst in der Express-Leiste zu erscheinen.
- **Phrase speichern:** speichert die aktuelle Nachricht der Express-Leiste im Phrasen-Ordner zur späteren Wiederverwendung.
- **Rückgängig:** macht die letzte Tipp- oder Bearbeitungsaktion rückgängig.
- **Einstellungen:** öffnet die Einstellungen der Tastaturseite. Dort sind zahlreiche Einstellungen zur Vorhersage und zu CARA aufgeführt. Vorhersage deaktivieren ist eine davon.
- **Zurück:** schließt das Aktionsmenü.

2. **Vorhersagezeile.** Eine Zeile mit Vorschlägen liegt unter der Express-Leiste. Die meisten Vorschläge zeigen ein kleines Symbol neben dem Wort zur Unterstützung symbolbasierter Kommunikation. Der Inhalt dieser Zeile ändert sich je nach Inhalt der Express-Leiste:
- **Ist die Express-Leiste leer,** zeigt die Zeile Satzanfänge wie *"Ich will," "Ich brauche"* und *"Danke."*
 - **Während der Nutzer tippt,** zeigt die Zeile Wortvervollständigungen anhand der bisher eingegebenen Buchstaben.

Die Mikrofontaste am rechten Ende der Vorhersagezeile aktiviert **CARA**. Mehr zu CARA *siehe Abschnitt 3.2.2.*

3. **Tastatur.** Eine bildschirmfüllende, eigene Tastatur mit großen Tastenflächen. Die beiden unteren Zeilen enthalten:
- **Umschalt** (Pfeil nach oben): schaltet Großschreibung um
 - **123:** wechselt zu Zahlen
 - **.,?!:** schnelle Satzzeichen
 - **Leertaste:** Leerzeichen
 - **Sprechen** (Lautsprechersymbol): spielt die aktuelle Nachricht der Express-Leiste per Sprachausgabe
 - **Tastatur-Umschalter:** wechselt zwischen der eigenen GoTalk NOW Tastatur und der iOS-Standardtastatur des iPads
 - **Löschen** (Rücktaste): entfernt das letzte Zeichen

Eine Nachricht verfassen

Tippen Sie Wörter über die Tastatur. Mit jeder Eingabe aktualisiert sich die Express-Leiste, und Wortvorhersagen erscheinen in der Vorhersagezeile. **GoTalk NOW** stützt seine Wortvorhersage auf den Tippverlauf des Nutzers, die auf anderen Seiten des aktuellen Kommunikationsbuchs verwendeten Wörter und kontextbezogene Vorschläge, um beim Tippen die relevantesten Optionen anzuzeigen. Tippen Sie einen Vorschlag an, um ihn in die Express-Leiste einzufügen.

Tippen Sie bei leerer Leiste einen Satzanfang aus der Vorhersagezeile an, um mit einer gängigen Eröffnung zu beginnen.

Ist die Nachricht fertig, tippen Sie auf die Express-Leiste oder die Taste **Sprechen** auf der Tastatur, um sie abzuspielen.

Um Rechtschreibung oder Grammatik zu bereinigen, tippen Sie auf die Taste **Korrigieren** (Zauberstabsymbol) rechts der Express-Leiste.



3.2.1 DER PHRASEN-ORDNER: Der Phrasen-Ordner

speichert mit **Phrase speichern** gesicherte Nachrichten zur schnellen späteren Wiederverwendung. Das Symbol **Phrasen-Ordner** ist in der untersten Tastaturzeile und über die Schaltfläche **Phrasen** des Aktionsmenüs erreichbar.

Um eine Phrase zu speichern, öffnen Sie das Aktionsmenü und tippen auf Phrase speichern. Phrasen werden in Kategorien gespeichert. Ist eine Kategorie angelegt, wählen Sie sie oder legen eine neue an.

Wird eine gespeicherte Phrase aus dem Ordner gewählt, spielt sie direkt, ohne zuerst in der Express-Leiste zu erscheinen.



Fig. 3.6 Phrase tippen, Aktionsmenü öffnen, Phrase speichern antippen, dann eine Kategorie wählen oder neu anlegen.



 CARA erfordert iOS 26 (oder neuer) und aktiviertes Apple Intelligence auf dem iPad.



 **CARA-**
Vorschläge
füllen die
Express-Leiste, statt sofort
abzuspielen, sodass der
Nutzer die Formulierung vor
dem Senden anpassen
kann.

3.2.2 CARA: CONVERSATION-AWARE RESPONSE ASSISTANT: CARA nutzt das Mikrofon des iPads, um die Sprache eines Gesprächspartners zu erfassen und dem AAC-Nutzer passende Antwortvorschläge zu bieten. Fragt ein Partner etwa *"Was möchtest du essen?"*, kann CARA Antwortoptionen anzeigen wie *"Ich habe Hunger"*, *"Pizza, bitte"* oder *"Ich habe noch keinen Hunger."*

CARA aktivieren

Tippen Sie auf die Mikrofontaste am rechten Ende der Vorhersagezeile, um CARA zu starten. Das Mikrofon bleibt aktiv und hört während des Gesprächs durchgehend zu. Tippen Sie erneut auf das Mikrofon, um das Zuhören zu beenden.

CARA-Vorschläge verwenden

Während CARA zuhört, aktualisiert sich die Vorhersagezeile mit Antwortvorschlägen anhand der Eingaben des Partners. So nutzen Sie einen Vorschlag:

1. Tippen Sie den Vorschlag an. Der Text wandert in die Express-Leiste.
2. Optional können Sie die Nachricht tippen oder bearbeiten, um sie zu verfeinern. Zum Bearbeiten nutzen Sie die Taste **Löschen**, um zur gewünschten Stelle zu gelangen, da ein Tippen auf die Express-Leiste die Phrase spricht.
3. Tippen Sie auf die Express-Leiste oder die Taste **Sprechen**, um die Antwort abzuspielen.

3.3 EXPRESS-SEITEN VERWENDEN

Express-Seiten nutzen eine Express-Leiste, um ausgewählte Nachrichtentasten zu kombinieren und nacheinander abzuspielen. Das Tippen einer Nachrichtentaste fügt sie der Express-Leiste hinzu.

Express-Leiste zu Seiten hinzufügen

Bei einer im Seiten-Editor geöffneten Kommunikationsseite tippen Sie auf die Schaltfläche **Seitenoptionen** und schalten die Einstellung **Express-Seite** für diese Seite ein. Eine Express-Leiste wird auf der Kommunikationsseite platziert. Um die Express-Leiste zu entfernen, kehren Sie zu den **Seitenoptionen** zurück und schalten die Einstellung **Express-Seite** aus.

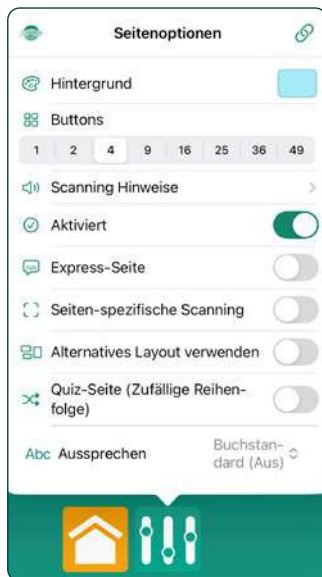


Fig. 3.7 Seitenoptionen

Die Express-Leiste im Player verwenden

Erscheint die Express-Leiste über einer Kommunikationsseite, fügt das Tippen einer Nachrichtentaste diese Nachricht der Express-Leiste hinzu. Die Zahl der Nachrichtentasten in der Express-Leiste ist unbegrenzt, und eine Nachrichtentaste kann mehrfach hinzugefügt werden. Um die zuletzt hinzugefügte Nachrichtentaste zu entfernen, tippen Sie auf die Taste **Löschen** der Express-Leiste.

Um den Inhalt der Express-Leiste als eine Nachricht abzuspielen, tippen Sie irgendwo auf die Express-Leiste. Um die Nachricht erneut zu hören, tippen Sie auf die Taste **Wiederholen** der Express-Leiste. Sobald eine Nachricht abgespielt wurde, ersetzt eine Taste **Wiederholen** die Taste **Löschen** auf der Express-Leiste.

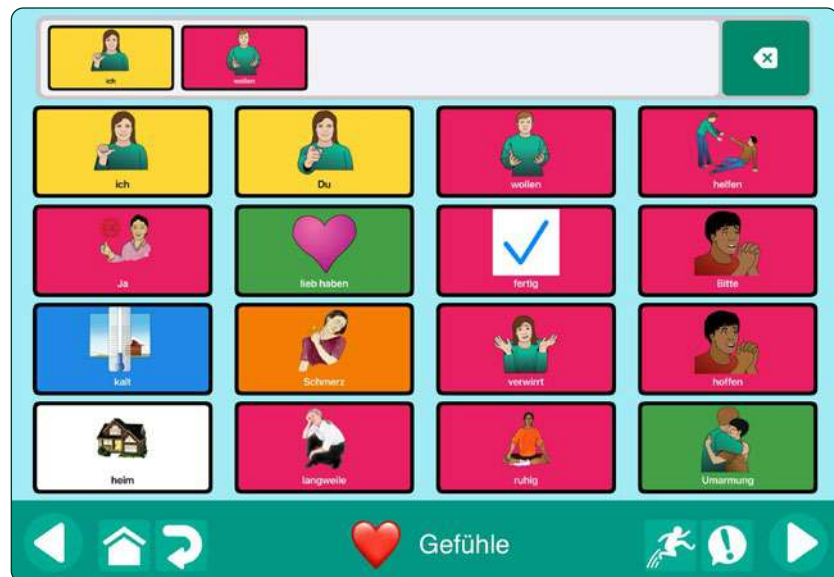


Fig. 3.8 Tippen Sie Nachrichtentasten an, um sie der Express-Leiste hinzuzufügen. Tippen Sie dann auf die Express-Leiste, um die Nachricht zu hören.

Optionale Funktionen der Express-Seite

Aktivieren Sie optionale Funktionen der Express-Seite in den App-Einstellungen.

- **Position der Express-Leiste:** Die Express-Leiste kann oben oder unten auf allen Buchseiten liegen.
- **Neue Seiten als Express-Seiten erstellen:** Aktiviert enthält jede neue Seite eines Buchs die Express-Leiste.
- **TTS-Elemente beim Sprechen zusammenfassen:** Aktiviert wird die Reihe der Sprachausgab-Nachrichten als ein Satz gelesen. Deaktiviert entsteht zwischen den Nachrichten eine Pause.
- **Als Wortfragmente zusammenfassen.** Aktiviert wird eine Reihe einzelner Buchstaben in der Express-Leiste zu einem Wort zusammengelesen. HINWEIS: Die App-Einstellung "TTS-Elemente beim Sprechen zusammenfassen" muss ebenfalls aktiviert sein.

Inhalt der Express-Leiste teilen

Nachrichtentasten in der Express-Leiste lassen sich als Text oder mit Bildern senden, per E-Mail oder Textnachricht. Halten Sie die Express-Leiste gedrückt, um das Teilen-Fenster zu öffnen, und wählen Sie eine Versandart. Alle in der Nachricht verwendeten Nachrichtentasten werden im Bild einbezogen.



Fig. 3.9 Teilen Sie die Nachricht der Express-Leiste als Text oder mit den Bildern.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm unten auf den Buchtitel, um eine Liste der Kommunikationsbücher in Ihrer **GoTalk NOW**-Buchbibliothek zu sehen. Es ist immer mindestens ein Buch aufgeführt; es ist nicht möglich, alle Bücher der Bibliothek zu löschen.

Um ein neues Kommunikationsbuch zu erstellen, tippen Sie auf + oben links im Tab-Fenster der Bibliotheksliste.



Fig. 4.1 Öffnen Sie die Buchbibliothek und tippen Sie auf das +, um ein Buch hinzuzufügen.



Fig. 4.2 Bücher müssen einen eindeutigen Titel haben.

Um eine Liste der Kommunikationsbücher in Ihrer **GoTalk NOW**-Bibliothek zu sehen, tippen Sie unten auf dem Startbildschirm auf den Buchtitel. Es ist immer mindestens ein Buch aufgeführt; es ist nicht möglich, alle Bücher der Bibliothek zu löschen.

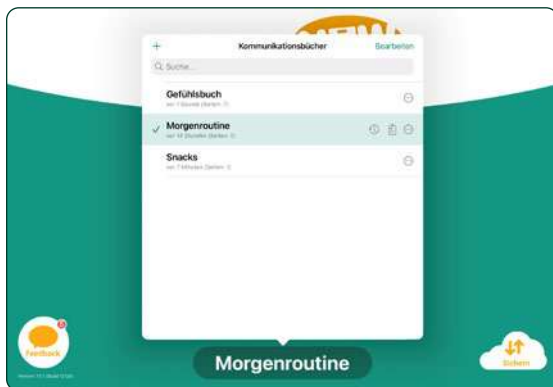


Fig. 5.1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Buchtitel, um die Bücher Ihrer Bibliothek zu sehen.



Fig. 5.2 Das Buch *Conversation Starters* wurde gedrückt gehalten und kann nun an eine andere Stelle in der Liste verschoben werden.

5.1 REIHENFOLGE DER BÜCHER ÄNDERN

Tippen Sie bei geöffneter Liste der Kommunikationsbücher auf **Bearbeiten** oben rechts.

Um ein einzelnes Buch zu verschieben, halten Sie das Symbol **Ziehleiste** (drei Linien) des Buchs gedrückt und ziehen das Buch an seine neue Stelle in der Liste.

Um die Liste **alphabetisch, nach letztem Änderungsdatum** oder **nach Seitenzahl zu sortieren**, tippen Sie auf das **Pfeil-hoch/runter-Symbol** oben links.

Tippen Sie auf **Fertig**, wenn das Umordnen der Bücher abgeschlossen ist.

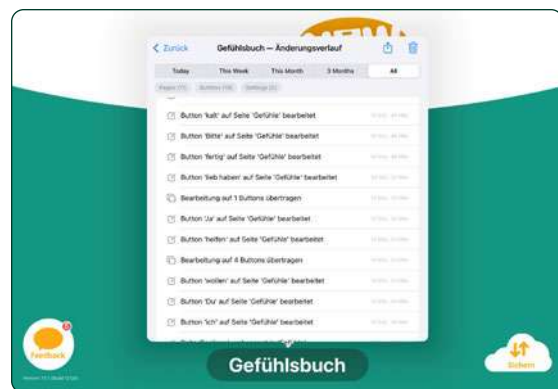


Fig. 5.3 Das **Änderungsprotokoll** eines Buchs enthält, wie und wann das Buch erstellt wurde, sowie alle daran vorgenommenen Änderungen.

5.2 ÄNDERUNGSPROTOKOLL

Am Buch vorgenommene Änderungen und sein Erstelldatum sind im **Änderungsprotokoll** aufgeführt. Zum Ansehen tippen Sie das Buch zum Markieren an, dann auf das Uhr-Symbol Änderungsprotokoll.

5.3 VOKABELBERICHT (NUR ENGLISCH)

Ein leistungsstarkes neues Werkzeug für Logopäden und Lehrkräfte, um den Wortschatz eines Kommunikationsbuchs zu analysieren, Fortschritte zu verfolgen und fundiert zu entscheiden, was als Nächstes vermittelt wird. Dieser Bericht analysiert Verfügbarkeit, Organisation und kommunikative Funktionen des Wortschatzes. Die Schwellenwerte beruhen auf veröffentlichter Forschung, sollten aber zusammen mit klinischer Beobachtung betrachtet werden. Nur auf Englisch verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im separaten **Vocabulary Report User Guide**, zu finden unter Startbildschirm > Hilfe.

5.4 BUCHOPTIONEN

Jedes Buch der Liste hat ein Symbol Weitere Optionen (Kreis mit drei Punkten). Das Antippen von **Weitere Optionen** beim gewählten Buch zeigt etwas andere Optionen als bei nicht gewählten Büchern.

Nicht gewählte Bücher, **Weitere Optionen**:

- **Löschen** - Löscht das Buch aus der **GoTalk NOW**-Bibliothek. Das aktuell gewählte Buch kann nicht gelöscht werden. (Wählen Sie ein anderes Buch, dann löschen.)
- **Umbenennen** - Ändert den Buchtitel.
- **Duplizieren** - Erstellt ein Duplikat des Buchs mit neuem Namen.
- **Sichern/Wiederherstellen** - Öffnet das Menü Sichern & Teilen. *Mehr zu dieser Option in Abschnitt 6.*
- **Komprimiertes Buch teilen** - Öffnet das Menü **Sichern & Teilen**. *Mehr zu dieser Option in Abschnitt 6.*
- **Als PDF exportieren** - Wandelt das Buch in eine PDF-Datei um. Diese PDF lässt sich drucken, in Files speichern, per AirDrop, E-Mail oder über jeden auf dem iPad eingerichteten Cloud-Speicher teilen.



Fig. 5.5 Dies zeigt die Liste **Weitere Optionen** für das gewählte Buch, *School to Work*.



**GoTalk NOW
LITE und
GoTalk Start**

erlauben kein Teilen von Büchern und Vorlagen. Diese beiden Apps sind auf ein einziges Kommunikationsbuch beschränkt. Der Buchtitel wird nicht auf dem Startbildschirm angezeigt, und die Bibliothekslistenansicht ist nicht verfügbar.

Gewähltes Buch, **Weitere Optionen**: Beachten Sie, dass das gewählte Buch nicht gelöscht werden kann.

- **Umbenennen** - Ändert den Buchtitel.
- **Duplizieren** - Erstellt ein Duplikat des Buchs mit neuem Namen.
- **Sichern/Wiederherstellen** - Öffnet das Menü Sichern & Teilen. *Mehr zu dieser Option in Abschnitt 6.*
- **Komprimiertes Buch teilen** - Öffnet das Menü Sichern & Teilen. *Mehr zu dieser Option in Abschnitt 6.*
- **Als PDF exportieren** - Wandelt das Buch in eine PDF-Datei um. Nach dem Antippen und abgeschlossener Umwandlung erscheint ein Pop-up mit Sendeoptionen wie E-Mail, AirDrop, In Files speichern und Drucken.
- **Tasten neu erzeugen** - Verfügbar zur Fehlerbehebung mit dem technischen Support von Attainment.
- **Tasten neu zentrieren** - Verfügbar zur Fehlerbehebung mit dem technischen Support von Attainment.
- **Änderungsprotokoll** - Öffnet das Änderungsprotokoll dieses Buchs.
- **Vokabelbericht** - Öffnet die Vokabelberichte

Am zuverlässigsten und einfachsten teilen oder sichern Sie Ihr Kommunikationsbuch, indem Sie eine komprimierte Datei erstellen und in Files speichern, per AirDrop senden, per E-Mail verschicken oder in einen Cloud-Speicher hochladen.

GoTalk NOW-komprimierte Bücher werden als .gtbz-Dateien gespeichert (GoTalk Book Zipped). Diese Buchdateien werden automatisch entpackt, wenn sie in die GoTalk NOW App gelegt werden (mehr dazu in Abschnitt 6.1.1 **Buch aus Files in GTN exportieren**).

Ältere Sicherungsmethoden sind bei Bedarf weiter verfügbar. Diese Optionen erreichen Sie, indem Sie **Legacy-Optionen** im Fenster **Sichern & Teilen** wählen, das sich öffnet, wenn Sie auf die Schaltfläche **Sichern** unten rechts auf dem GoTalk NOW Startbildschirm tippen.

6.1 KOMPRIMIERTES BUCH TEILEN

So sichern oder teilen Sie ein komprimiertes Buch:

1. Auf der Startseite von **GoTalk NOW** muss der Titel des zu teilenden Buchs unten auf der Seite angezeigt werden. Um das Buch zu wechseln, tippen Sie auf den aktuellen Buchtitel und wählen das zu teilende Buch.
2. Sobald der Titel des zu teilenden Buchs angezeigt wird, tippen Sie auf die Schaltfläche **Sichern** unten rechts auf der Startseite.
3. Tippen Sie auf **Teilen**.
4. Wählen Sie **In Files speichern** oder eine andere Art, die Datei zu teilen. Wenn Sie die Datei vor dem Speichern in **Files** umbenennen möchten, tippen Sie auf **Sichern unter** unten im Pop-up (das mit dem GoTalk NOW Symbol) und geben den neuen Buchnamen ein.

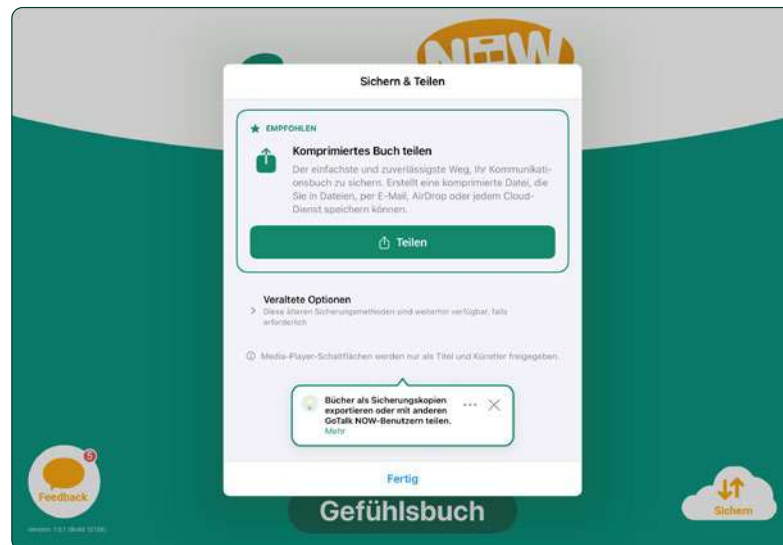


Fig. 6.1 Tippen Sie auf **Teilen** im Pop-up **Sichern & Teilen**.

6.1.1 BUCH AUS FILES IN GTN EXPORTIEREN: So exportieren

Sie ein in Files gespeichertes Buch in GoTalk NOW:

1. Öffnen Sie die **Files** App.
2. **Downloads** ist der Standardort, an dem übertragene Bücher gespeichert werden. Öffnet sich der Ordner **Downloads** nicht, tippen Sie auf **iCloud Drive**.
3. Tippen Sie auf den Ordner **Downloads**.
4. Suchen und tippen Sie auf die **GoTalk NOW Datei** (Dateityp .gtbz) zum Exportieren.
5. Tippen Sie auf **Teilen** oben rechts im Pop-up.
6. Wählen Sie das **GoTalk NOW**-Symbol.
7. Tippen Sie auf **Erstellen**, oder benennen Sie die Datei vor dem Tippen auf **Erstellen**.

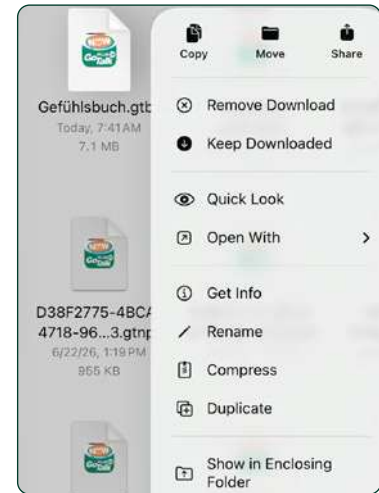


Fig. 6.2 Tippen Sie in **Files** > **Download** auf die Buchdatei und wählen **Teilen**, um sie nach **GoTalk NOW** zu verschieben.

6.2 AIRDROP

Sowohl Sender als auch Empfänger müssen Wi-Fi und Bluetooth eingeschaltet haben. Die beiden Geräte müssen höchstens 10 Meter (30 Fuß) voneinander entfernt sein. Prüfen Sie, dass der Empfänger in den AirDrop-Einstellungen auf Empfang von **Jeder für 10 Minuten**.

1. Auf der Startseite von **GoTalk NOW** muss der Titel des zu teilenden Buchs unten auf der Seite angezeigt werden. Um das Buch zu wechseln, tippen Sie auf den aktuellen Buchtitel und wählen das zu teilende Buch.
2. Wenn der Titel des zu teilenden Buchs angezeigt wird und das Pop-up **Sichern & Teilen** geöffnet ist, tippen Sie auf die Schaltfläche **Teilen**.
3. Wählen Sie im Pop-up **AirDrop**.
4. Ein Pop-up zeigt das iPad des Empfängers und eventuell weitere verfügbare Geräte. Tippen Sie auf den gewünschten Empfänger.



Fig. 6.3 Wählen Sie das **AirDrop**-Symbol.

5. Das iPad des Empfängers zeigt eine Meldung, dass AirDrop die .gtbz-Datei teilen möchte. Tippen Sie auf **Akzeptieren**. Sobald die Datei im Downloads-Ordner des Empfängers gespeichert ist, erscheint ein Pop-up mit dem Dateinamen.
6. Um eine Kopie der Datei an das GoTalk NOW des Empfängers zu senden, wählen Sie das **Senden-Symbol** oben rechts und wählen **GoTalk NOW**.

6.3 CLOUD-SPEICHER

Beim Senden per E-Mail oder an einen Cloud-Dienst wie Dropbox, OneDrive oder Google Drive muss die kostenlose App vor dem Sichern auf das iPad geladen und mit einem Benutzerkonto eingerichtet werden.

1. Auf der Startseite von **GoTalk NOW** muss der Titel des zu teilenden Buchs unten auf der Seite angezeigt werden. Um das Buch zu wechseln, tippen Sie auf den aktuellen Buchtitel und wählen das zu teilende Buch.

2. Sobald der Titel des zu teilenden Buchs angezeigt wird, tippen Sie auf die Schaltfläche **Sichern** auf der Startseite.
3. Tippen Sie auf **Teilen**.
4. Wählen Sie das Symbol für E-Mail oder den Cloud-Dienst.

6.4 SICHERN/WIEDERHERSTELLEN MIT ITUNES UND FINDER

Wenn Apple iTunes auf Ihrem Computer ist, können Sie mit iTunes File Sharing Dateien zwischen Computer und iPad kopieren.

*HINWEIS: Macs ab 2019 nutzen kein iTunes;
siehe den nächsten Abschnitt, 6.4.1.*

Sicherung auf Ihrem Computer mit iTunes

1. Schließen Sie die **GoTalk NOW** App. Verbinden Sie das iPad über den USB-Anschluss mit dem Computer.
2. Öffnen Sie iTunes auf dem Computer und wählen Sie bei Bedarf Ihr iPad in der iTunes-Menüleiste.
3. Öffnen Sie die Liste Ihrer iPad-Apps, indem Sie auf **File Sharing** in der Liste *Einstellungen* klicken.
4. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt *File Sharing* und wählen **GoTalk NOW** aus der Liste der angezeigten Apps. Eine Liste Ihrer Kommunikationsbücher wird angezeigt. Wählen Sie das zu sichernde Buch und speichern es in einem Ordner auf Ihrem Computer.

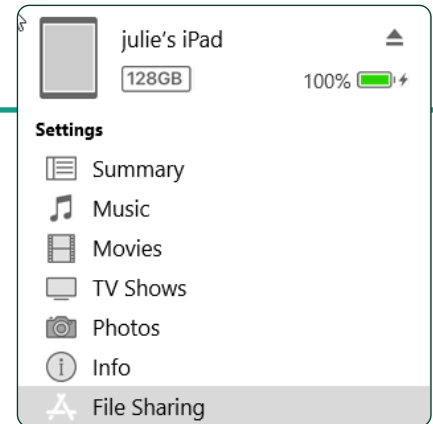


Fig. 6.4 Zeigen Sie in iTunes die Apps des iPads an, indem Sie File Sharing wählen.

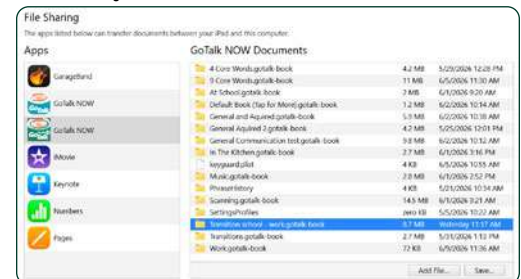


Fig. 6.5 Jedes Kommunikationsbuch wird als Ordner angezeigt.

Mac: ziehen Sie das Buch in einen Ordner oder nutzen die Schaltfläche "Save to"

Windows: nutzen Sie die Schaltfläche "Save to"

Ein gesichertes Kommunikationsbuch mit iTunes wiederherstellen:

1. Schließen Sie die **GoTalk NOW** App. Verbinden Sie das iPad über den USB-Anschluss mit dem Computer.
2. Öffnen Sie iTunes auf dem Computer und wählen Sie bei Bedarf Ihr iPad in der iTunes-Menüleiste.
3. Öffnen Sie die Liste Ihrer iPad-Apps, indem Sie auf **Apps** in der Liste *Einstellungen* klicken.
4. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt *File Sharing* und wählen **GoTalk NOW** aus der Liste der angezeigten Apps.
5. Ziehen Sie den Kommunikationsbuch-Ordner von seinem Speicherort in die **GoTalk NOW -Dokumentenliste** in iTunes.
6. Öffnen Sie die **GoTalk NOW** App. Das wiederhergestellte Kommunikationsbuch ist nun in der Bibliotheksliste verfügbar.

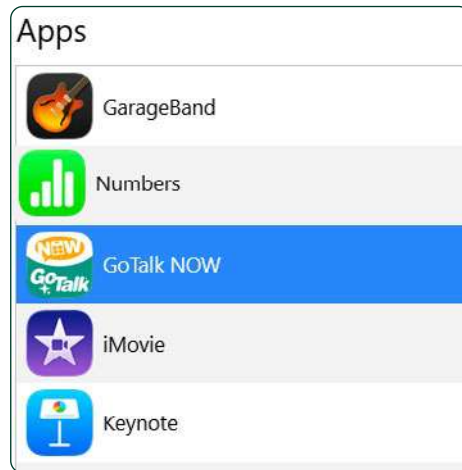


Fig. 6.6 Wählen Sie **GoTalk NOW** aus Ihrer App-Liste.

6.4.1 SICHERUNG AUF IHREM COMPUTER ÜBER DEN FINDER:

Wenn Sie macOS 2019 oder neuer verwenden, ist iTunes nicht verfügbar, doch File Sharing ist über den **Finder integriert**. 

Ist Ihr iPad angeschlossen, erscheint es unter *Locations*, und seine Dateien werden aufgelistet. Suchen Sie den Ordner **GoTalk NOW** und kopieren oder ziehen Sie die Kommunikationsbuch-Datei(en) in einen Ordner auf Ihrem Desktop-Computer.

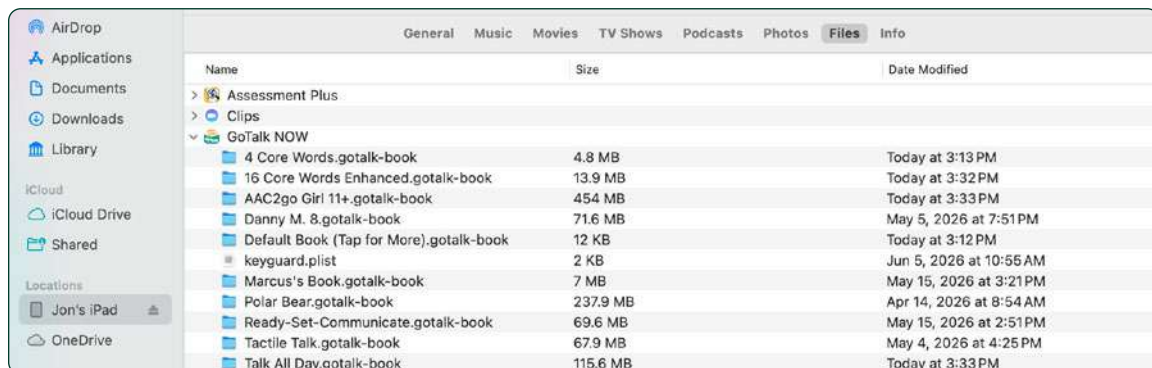


Fig. 6.7 Die Liste der **GoTalk NOW** Bücher auf dem iPad im **Finder**.

Kommunikationsseiten lassen sich als Vorlagen speichern. Eine Vorlage kann 1 bis 10 Seiten lang sein. Auf ein Kommunikationsbuch lassen sich eine oder mehrere Vorlagen anwenden. Selbst erstellte Vorlagen werden in der Galerie **Meine Vorlagen** der App gespeichert. Diese Vorlagen lassen sich auch teilen.

7.1 EINE VORLAGE ERSTELLEN

Das Buch mit der/den als Vorlage zu verwendenden Seite(n) muss auf dem Startbildschirm von **GoTalk NOW** angezeigt werden. So erstellen Sie eine neue Vorlage:

- Öffnen Sie den **Seiten-Editor**, dann tippen Sie auf die Schaltfläche **Seiten verwalten**, um die Liste **Seiten** zu wählen.
- Tippen Sie oben im Listfenster auf das '+', dann wählen Sie **Meine Vorlagen**.
- Tippen Sie auf **Neue Vorlage erstellen**.
- **Vorlagenname:** Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.
- **Beschreibung:** Geben Sie eine Beschreibung für die Vorlage ein.
- **Autor:** Geben Sie den Namen des Autors ein; bleibt das Feld leer, wird der Autor als 'Anonymous' geführt.
- **Seiten:** Tippen Sie auf **Seiten**, um bis zu 10 Seiten aus dem Buch zu wählen. Gewählte Seiten zeigen ein Häkchen. Tippen Sie auf **Fertig**.
- **Screenshot:** Tippen Sie auf **Screenshot**, um eine Seite als Symbol der Vorlage in der Liste **Meine Vorlagen** zu wählen.
- Wenn alle Vorlageninformationen vollständig sind, tippen Sie auf **Erstellen**, um Ihre neue Vorlage zu speichern in der Galerie **Meine Vorlagen**.



Fig. 72 Tippen Sie bei geöffnetem **Meine Vorlagen** auf **Neue Vorlage erstellen**.

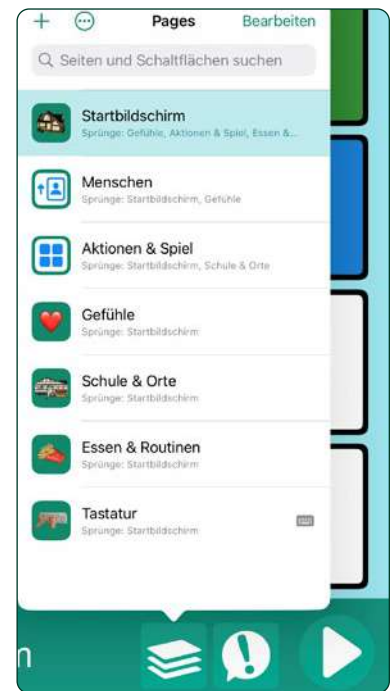


Fig. 71 Um eine Vorlage zu erstellen, tippen Sie auf das + in der Liste **Seiten**, dann auf **Meine Vorlagen**.



Fig. 73 Wenn die Vorlageninformationen eingegeben sind, tippen Sie auf **Erstellen**, um sie zu speichern in **Meine Vorlagen**.

7.2 EINE VORLAGE TEILEN

Vorlagen lassen sich per AirDrop, E-Mail oder jeden auf dem iPad eingerichteten Cloud-Dienst teilen und in die Online-Vorlagengalerie hochladen.

So teilen Sie:

- Tippen Sie im **Seiten-Editor** auf die Schaltfläche **Seiten verwalten**.
- Tippen Sie in der Liste **Seiten** auf '+' oben im Listfenster, um das Menü **Neue Seite** zu öffnen.
- Wählen Sie **Meine Vorlagen**, um die verfügbaren Vorlagen zu sehen. Wählen Sie die zu teilende Vorlage. Drei Optionen stehen zur Wahl: **E-Mail**, **Online-Vorlagengalerie hochladen** und **Teilen**.

7.2.1 EMAIL: Vor dem Teilen muss ein E-Mail-Benutzerkonto eingerichtet sein.

- Tippen Sie im **Seiten-Editor** auf die Schaltfläche **Seiten verwalten**.
- Tippen Sie in der Liste **Seiten** auf '+' oben im Listfenster, um das Menü **Neue Seite** zu öffnen.
- Tippen Sie auf **Meine Vorlagen**, um die verfügbaren Vorlagen zu sehen, und wählen die per E-Mail zu sendende Vorlage.
- Tippen Sie auf **E-Mail**.

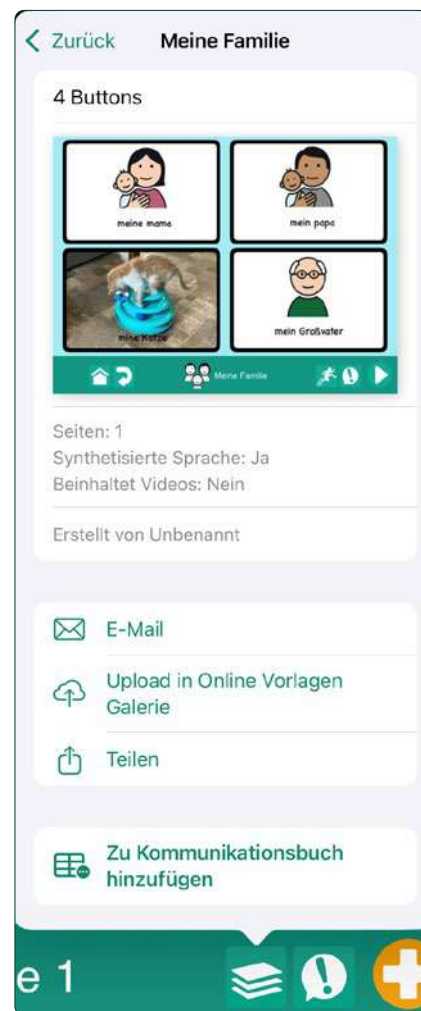


Fig.74 Von Ihnen erstellte Vorlagen lassen sich teilen.



Fig. 75 Wählen Sie **In Online-Vorlagengalerie hochladen**, um Ihre Vorlagen über die Öffentliche oder Private Online-Galerie zu teilen.



Fig. 76 Beim Hochladen in die Private Galerie wird ein Freigabecode vergeben; kopieren Sie den **Freigabecode**, um ihn mit anderen zu teilen.

7.2.2 IN ONLINE-GALERIE HOCHLADEN: Ihre Seitenvorlagen lassen sich einer **Öffentlichen Galerie** oder **Private Galerie** hinzufügen, um sie mit anderen **GoTalk NOW**-Nutzern zu teilen. Vorlagen, die in die **Öffentliche Galerie** hochgeladen werden, stehen allen **GoTalk NOW**-Nutzern zur Verfügung. Ist eine Vorlage zur Öffentlichen Galerie hinzugefügt, kann sie nicht bearbeitet werden, solange sie in der Galerie bleibt. Wird eine Vorlage in die **Private Galerie** hochgeladen, steht sie nur Personen zur Verfügung, die den **Freigabecode** der Vorlage kennen. Dieser Freigabecode wird über der Schaltfläche **In Private Galerie hochladen**.

So laden Sie eine Vorlage hoch:

- Tippen Sie im **Seiten-Editor** auf die Schaltfläche **Seiten verwalten**.
- Tippen Sie in der Liste **Seiten** auf + oben im Listenfenster, um das Menü **Neue Seite** zu öffnen.
- Wählen Sie **Meine Vorlagen**, um die verfügbaren Vorlagen zu sehen, dann wählen Sie die zu teilende Vorlage.
- Wählen Sie das Fenster **In Online-Vorlagengalerie hochladen**.
- Wählen Sie entweder **Öffentliche Galerie** oder **Private Galerie**.
- **In Öffentliche Galerie hochladen:** Wählen Sie Öffentliche Galerie, dann eine Galeriekategorie für die Vorlage, und tippen Sie auf die Schaltfläche **In Öffentliche Galerie hochladen**, um den Vorgang abzuschließen. Die Vorlage ist nun in der Öffentlichen Galerie.
- **In Private Galerie hochladen:** Wählen Sie Private Galerie, dann kopieren Sie den **Freigabecode** oder ändern Sie den Freigabecode. Nur Personen mit dem **Freigabecode** können die Vorlage verwenden.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **In Private Galerie hochladen**, um den Vorgang abzuschließen. Sie ist nun bereit zum Teilen; senden Sie den **Freigabecode** an alle, mit denen Sie die Vorlage teilen möchten.

7.2.3 TEILEN: Vorlagen lassen sich direkt an andere senden oder in jedem bereits auf dem iPad eingerichteten Cloud-Speicher ablegen. So teilen Sie eine Vorlage:

- Tippen Sie im **Seiten-Editor** auf die Schaltfläche **Seiten verwalten**, um die Seitenliste zu öffnen.
- Tippen Sie auf + oben in der Liste, um das Menü **Neue Seite** zu öffnen.
- Wählen Sie **Meine Vorlagen**, um die verfügbaren Vorlagen zu sehen.
- Wählen Sie die zu teilende Vorlage.
- Wählen Sie **Teilen**.
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Methode, etwa AirDrop, Files, E-Mail oder jeden Cloud-Dienst, der auf dem iPad verfügbar ist. Folgen Sie den Anweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

7.3 KOSTENLOSE VORLAGEN HERUNTERLADEN

Die **Online-Galerie** ist eine Quelle kostenloser vorgefertigter Seiten und Vorlagen, hochgeladen von anderen **GoTalk NOW**-Nutzern und von Attainment Company.

Tippen Sie im **Seiten-Editor** auf die Schaltfläche **Seiten verwalten**, dann tippen Sie auf die Schaltfläche + oben im Menü **Neue Seite**. Wählen Sie **Online-Galerie**, um kostenlose Vorlagen zu durchsuchen.

- **Web-Galerie durchsuchen:** Geben Sie einen Suchbegriff ein, wählen Sie eine Kategorie oder sehen Sie die von der **GoTalk NOW**-Community beigesteuerten Vorlagen. Diese vorgefertigten Kommunikationsseiten sind eine gute Ideenquelle für eigene Seiten.

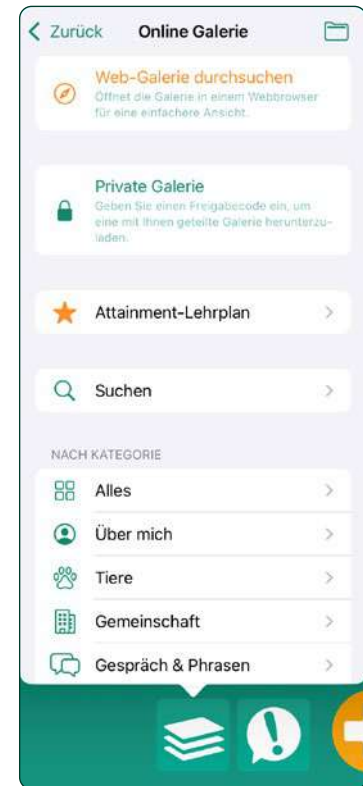


Fig. 7.7 Menü Online-Galerie.

- **Private Galerie:** GoTalk NOW-Nutzer können Seitenvorlagen miteinander teilen, indem sie den Freigabecode zu ihrer Galerie weitergeben.
- **Attainment Curriculum:** Kommunikationsseiten passend zum Lehrplan von Attainment in diesen Bereichen: English Language Arts, Math, Science, Social Studies und Transition.

Wenn Sie eine Vorlage gefunden und gewählt haben, tippen Sie auf die Schaltfläche **Vorlage herunterladen**. Die Vorlage wird Ihrem Bereich **Heruntergeladen** im Menü **Seite hinzufügen** hinzugefügt.

Um die heruntergeladene Vorlage zum aktuell geöffneten Buch hinzuzufügen, tippen Sie auf die Vorlage (**Seite hinzufügen – Heruntergeladen – Aus Online-Galerie**), dann tippen Sie auf die Schaltfläche **Zum Kommunikationsbuch hinzufügen**.

7.3.1 VORLAGEN ONLINE – WEBBROWSER: Zusätzlich zum Vorlagen-Browser in der App lassen sich **GoTalk NOW**-Vorlagen online auf jedem Gerät unter **gallery.gotalknow.com** ansehen. Die Online-Galerie enthält dieselben Vorlagen wie der Browser in der App. Stöbern Sie auf jedem Gerät, auch am Computer, und merken Sie sich Vorlagen, um sie später auf Ihrem iPad herunterzuladen. Die Online-Galerie ist öffentlich zugänglich und erfordert kein Konto.



Fig. 78 Sobald eine Vorlage gewählt ist, tippen Sie auf **Vorlage herunterladen**.



Quellen für
 OBF- und
 OBZ-Dateien

sind unter anderem
 openboardformat.org und
 die Open-Boards-Bibliothek
 von CoughDrop sowie
 Exporte aus anderen
 AAC-Apps, die das Format
 unterstützen.

7.4 OBF- UND OBZ- DATEIEN IMPORTIEREN

GoTalk NOW unterstützt den Import von AAC-Seiten und -Büchern im **Open Board Format** (OBF) und **Open Board Zip** (OBZ), beide offene Standards zum Teilen von AAC-Inhalten über Apps und Plattformen hinweg. Einmal importiert, verhalten sich OBF- und OBZ-Dateien wie Vorlagen: Sie erscheinen im **Seiten-Editor – Seite hinzufügen – Menü – Meine Vorlagen**, und lassen sich über mehrere Kommunikationsbücher hinweg wiederverwenden.

7.4.1 EINE OBF- ODER OBZ-DATEI ZUM IPAD HINZUFÜGEN:

1. Laden Sie die OBF- oder OBZ-Datei auf Ihr iPad. Sie erscheint in der App **Files**.
2. Öffnen Sie die **Files**-App und suchen Sie die heruntergeladene Datei.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Teilen**, dann wählen Sie **GoTalk NOW** aus der Zielliste.

Die Datei ist nun in **GoTalk NOW** gespeichert und steht für jedes Kommunikationsbuch zur Verfügung.

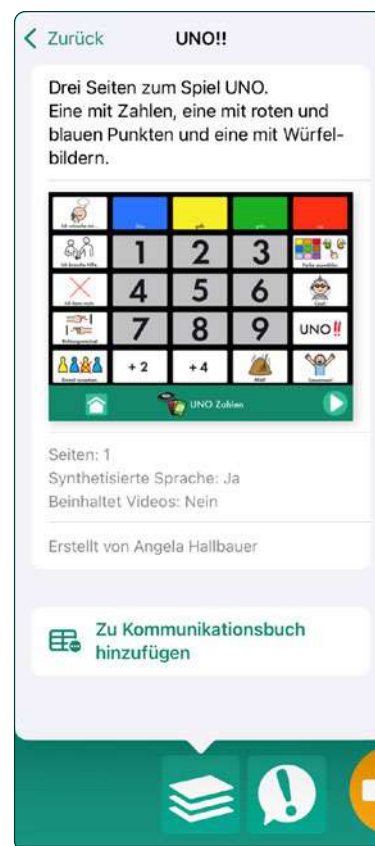


Fig. 79 Vorlage zum aktuellen Buch hinzufügen.



In **GoTalk NOW**
 importierte
 OBF- und

OBZ-Dateien bleiben in der
 App und lassen sich in
 mehreren Büchern
 wiederverwenden..



Das Löschen einer importierten OBF- oder OBZ-Datei entfernt sie nur aus **GoTalk NOW**. Bereits aus dieser Datei zu bestehenden Kommunikationsbüchern hinzugefügte Seiten sind nicht betroffen.



Da die Online-Galerie öffentlich zugänglich ist, können Sie sie von jedem Gerät aus durchstöbern — einem Desktop-Computer, einem anderen iPad oder einem Telefon — und interessante Vorlagen mit einem Lesezeichen versehen. Zum Herunterladen müssen Sie die Galerie jedoch auf dem iPad aufrufen, auf dem GoTalk NOW installiert ist.



7.4.2 EINE IMPORTIERTE OBF/OBZ ZU EINEM GTN-BUCH HINZUFÜGEN:

1. Tippen Sie im Seiten-Editor auf Seite hinzufügen.
2. Wählen Sie Importierte OBF aus der Liste.
3. Die OBF-Auswahl öffnet sich und listet alle von Ihnen importierten OBF- und OBZ-Dateien.
4. Tippen Sie auf eine Datei, um sie zum aktuellen Kommunikationsbuch hinzuzufügen. Bei OBZ-Dateien mit mehreren Boards werden alle enthaltenen Seiten auf einmal hinzugefügt. Bei OBF-Dateien mit einem einzelnen Board wird diese eine Seite hinzugefügt.

7.4.3 IMPORTIERTE DATEIEN VERWALTEN:

Importierte OBF- und OBZ-Dateien bleiben in GoTalk NOW, bis sie entfernt werden. So löschen Sie eine Datei aus Ihrer importierten Bibliothek:

1. Tippen Sie im Seiten-Editor auf **Seite hinzufügen**, dann **Importierte OBF**.
2. Tippen Sie auf **Bearbeiten** in der OBF-Auswahl.
3. Wählen Sie die zu entfernende(n) Datei(en), dann bestätigen Sie das Löschen.

Das Scannen wird aktiviert, und verschiedene Scan-Optionen finden Sie in den **Einstellungen** auf der Startseite. Die in GoTalk NOW integrierte Unterstützung für alternative Kommunikation umfasst zwei Scan-Modi.

- **Automatisches Scannen:** Verfügbare Bildschirmstasten werden nacheinander hervorgehoben, und der Ablauf erfolgt automatisch. Ein einzelner Schalter wählt eine hervorgehobene Taste. Die Scan-Geschwindigkeit ist von 1 bis 10 Sekunden pro Bildschirmauswahl einstellbar.
- **Schritt-Scannen:** Der Nutzer verschiebt mit einem Schalter die Hervorhebung zur nächsten Taste der Reihe und wählt mit einem zweiten Schalter die hervorgehobene Auswahl.

Scan-/Schalter-Gerätetypen: Das Scannen ist deaktiviert, wenn der **Scan-Gerätetyp** in den App-Einstellungen auf "Keine" gesetzt ist. Das Scannen ist aktiviert, wenn einer der Schalter-Gerätetypen gewählt ist.

- Tilde-Nummern-Schalter (alte RJ Cooper)
- Leer-/Eingabetasten-Schalter
- Bildschirm als Schalter verwenden

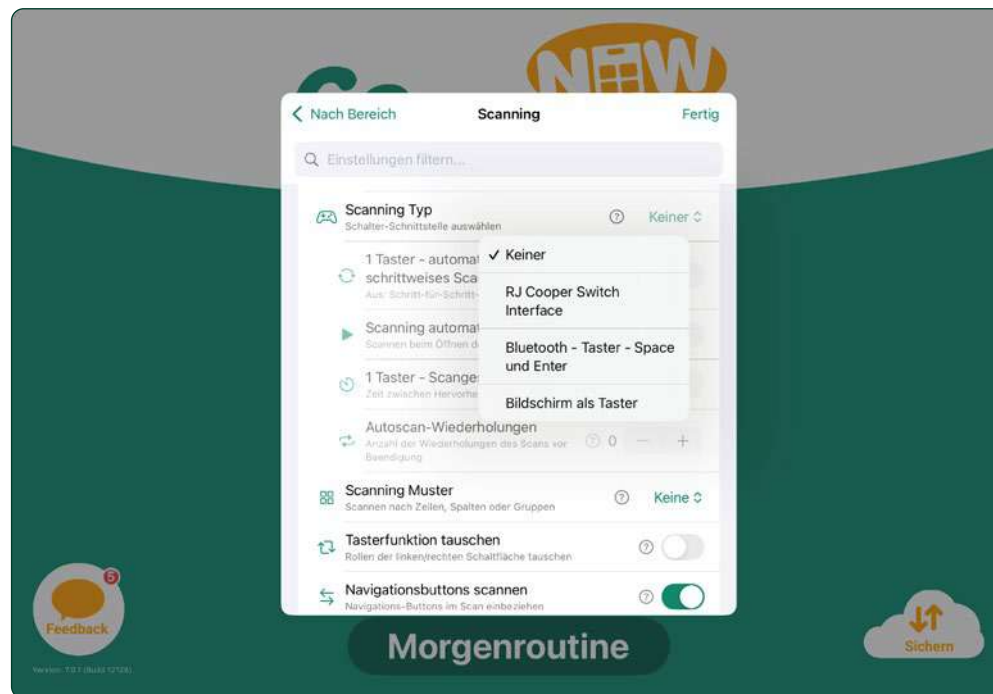


Fig. 8.1 Einstellung Scan-Gerätetyp.

Weitere Einstellungen für das Scannen:

Automatisches Scannen: Aktiviert werden Tasten automatisch nacheinander hervorgehoben. Ein Schalter wählt das hervorgehobene Element. Deaktiviert dient Schritt-Scannen mit zwei Schaltern.

- **Scannen automatisch starten:** Aktiviert beginnt das Scannen automatisch beim Öffnen einer Seite. Deaktiviert wartet das Scannen auf eine Schalterbetätigung.
- **Geschwindigkeit des automatischen Scannens:** Stellt das Intervall zwischen den Hervorhebungssprüngen von 1 bis 10 Sekunden ein.
- **Wiederholung des automatischen Scannens:** Die Anzahl der Scan-Durchläufe, bevor angehalten wird.

Hörsignale: Ein Hörsignal kann beim Scannen für jede Nachrichtentaste eine gesprochene Ansage geben. Dies nennt man "auditives Scannen".

Gruppierung: Zeilen, Spalten und Unterteilungen beider lassen sich in den Scan-Vorgang einbeziehen. Nach Auswahl einer Zeile oder Spalte setzt sich das Scannen auf den einzelnen Zellen dieser Zeile oder Spalte fort.

Schalterfunktionen tauschen: Beim Schritt-Scannen tauscht dies, welcher Schalter den Scan weiterbewegt und welcher eine Auswahl trifft.

Express-Leiste scannen: (Unter den Einstellungen der Express-Seite) Bei Express-Seiten lässt sich die Nachrichtenleiste in den Scan-Vorgang einbeziehen oder davon ausschließen.

Navigationstasten scannen: Die Navigationstasten des Players lassen sich in den Scan-Vorgang einbeziehen oder davon ausschließen.

Von aktueller Position fortsetzen: Aktiviert setzt sich das Scannen von der gewählten Position fort. Deaktiviert beginnt das Scannen oben auf der Seite neu.

Alternative Oberfläche: Vereinfacht die Videosteuerung.

GoTalk NOW Hörsignale statt iOS-Signale verwenden: Aktiviert und bei aktiver iOS-Schaltersteuerung spielen **GoTalk NOW** Hörsignale, während das System jede Taste hervorhebt. Deaktiviert und bei aktiver iOS-Schaltersteuerung werden iOS-Signale abgespielt.

Switchamajig-Unterstützung: Steuert Geräte über Switchamajig.

Vollbild-Scannen: Zeigt während des Scan-Vorgangs eine vergrößerte Vollbildtaste an.

Seitenspezifisches Scannen: (diese Einstellung ist eine **Seitenoption**) Die Gruppierungseinstellung des Buchs lässt sich pro Seite ändern.

Zusatz-Add-ons für **GoTalk NOW** erhalten Sie, indem Sie auf **Herunterladen** auf dem Startbildschirm tippen. Eine Vielzahl von Ressourcen ist entweder kostenlos oder als In-App-Kauf verfügbar.

Laden Sie die kostenlose **GoTalk Image Library** für Tausende von Symbolillustrationen herunter.

Zum Kauf tippen Sie auf das Preisschild neben dem Add-on. Nach dem Kauf tippen Sie auf **Herunterladen**, um es zu installieren. Ein vorgefertigtes Kommunikationsbuch tippen Sie nach dem Laden an, um es zu wählen und Ihrer Bücher-Liste hinzuzufügen.

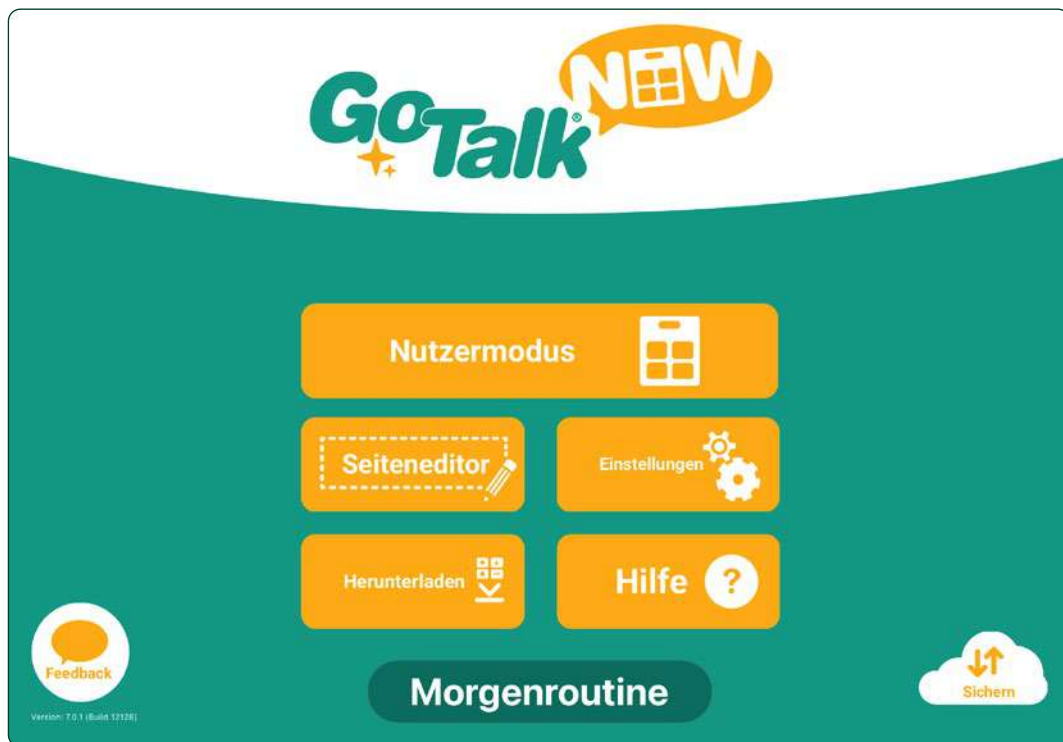


Fig. 9.1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **Herunterladen**, um die verfügbaren **GoTalk NOW** Ressourcen zu sehen.

Kernwörter

Die kostenlosen Kernwort-Bücher eignen sich ideal, um Schülern erste Sprache zu vermitteln. Im Player lassen sich Wörter auf Seiten gezielt ein- oder ausblenden. Bei Bedarf können Sie neue Seiten hinzufügen, um Ihr Kommunikationsbuch anzupassen.

Bildbibliotheken

Die **GoTalk Image Library** ist in **GoTalk NOW** enthalten. Erweitern Sie Ihre Bildoptionen mit den Bibliotheken **SymbolStix**, **Widgit Symbols**, **METACOM** und **PCS Symbol**.

Vorgefertigte Kommunikationsbücher

Suchen Sie einen Einstieg in die Kommunikation? Legen Sie gleich los mit **ComuniCAARTE**, **Ready-Set-Communicate**, **Talk All Day**, **Participate NOW**, **AAC2go Girl**, **AAC2go Boy**, **AAC2go Teen** und **Tactile Talk**. Diese kostenpflichtigen Bücher werden von AAC-Fachleuten erstellt. Diese Kommunikationsbücher sind bewusst so gestaltet, dass Sie sie an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen können.

Text-to-Speech-Stimmenshop

Passen Sie Ihre **GoTalk NOW** Nachrichten mit einer der vielen integrierten oder kostenpflichtigen Stimmen an.

Online-Galerie

Durchstöbern und laden Sie von anderen geteilte Kommunikationstafeln herunter, oder laden Sie eigene Vorlagen hoch, um sie mit der Community zu teilen. Mehr dazu in *Abschnitt 7.3*.

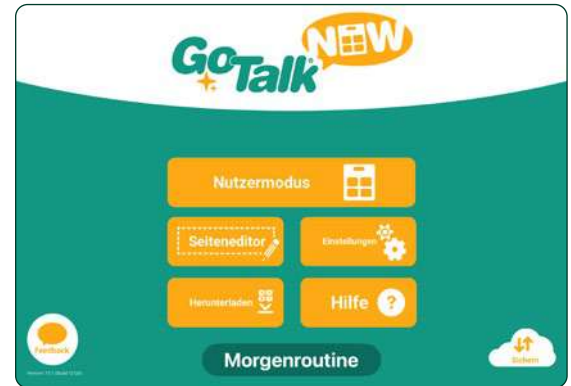


Fig. 9.2 Um die kostenlose **GoTalk NOW Image Library** herunterzuladen, tippen Sie auf **Bildbibliotheken** in Herunterladen.

Personalisierte digitale Stimmen

Um eine personalisierte digitale Stimme von Apple oder VocaliD mit **GoTalk NOW** zu nutzen, wählen Sie **verfügbare Stimme**. Besuchen Sie <https://support.apple.com> oder <http://www.vocalid.ai/> für Informationen zum Erstellen personalisierter digitaler Stimmen.

9.1 KÄUFE WIEDERHERSTELLEN

Mit der Schaltfläche **Käufe wiederherstellen** oben links im Menü **Downloads** stellen Sie zuvor gekaufte Bildbibliotheken und Text-to-Speech-Stimmen wieder her.

GoTalk NOW kann eine Kommunikationsseite an ein **GoTalk Connect**-Gerät exportieren, ein eigenständiges Mid-Tech-AAC-Gerät mit austauschbaren gedruckten Auflagen. Der Export erzeugt eine druckbare PDF-Auflage samt Audio und Touch-Hotspots passend zum Layout und überträgt sie per Bluetooth an das Gerät.

Bevor Sie eine Seite an ein GoTalk Connect exportieren, brauchen Sie:

- Ein eingeschaltetes GoTalk Connect-Gerät.
- Ein iPad mit aktiviertem Bluetooth.
- Eine in Ihrem Buch bereits erstellte Kommunikationsseite mit mindestens einer Taste.
- Eine Möglichkeit, die erzeugte PDF-Auflage für die Verwendung auf dem Gerät zu drucken.

Den Export starten

So exportieren Sie eine Seite:

1. Öffnen Sie die Seite im **Seiten-Editor**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Seitenoptionen**.
3. Tippen Sie auf das **GoTalk Connect**-Symbol oben links im Bildschirm **Seitenoptionen**.

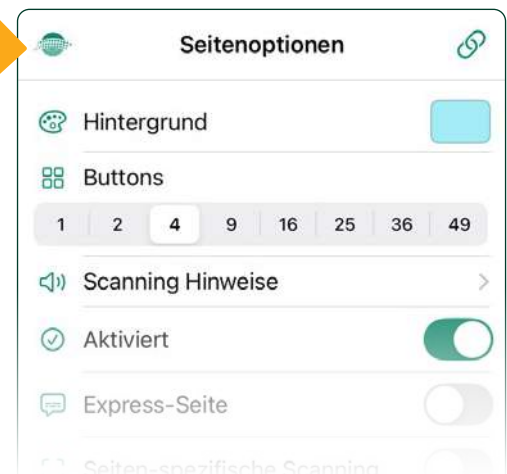


Fig. 10.1 Um eine Seite an ein GoTalk Connect zu exportieren, tippen Sie auf das Symbol oben links im Menü **Seitenoptionen**.

GoTalk
CONNECT



Export-Zusammenfassung

Beim Start eines Exports erscheint ein Bildschirm Export-Zusammenfassung, der angibt, was der Export enthält und was nicht.

Die Zusammenfassung umfasst:

- **Was übertragen wird:** Tastenbilder, -farben und -text; Audio (sowohl Text-to-Speech als auch aufgenommen); und Touch-Hotspots für jede Taste.

Hinweis: Beim Übertragen an das GoTalk Connect werden alle Tasten zu Hotspots und müssen mit dem einrastbaren Szenenraster verwendet werden.

- **Vorhandene Inhalte auf der gewählten Ebene werden ersetzt:** Der Export überschreibt alles, was zuvor auf der gewählten Farbebene des Geräts gespeichert war.
- **Einige Funktionen werden nicht übertragen:** Dieser Abschnitt listet alle seitenspezifischen Einschränkungen, die die App erkannt hat, etwa wenn die aktuelle Seite keine zu exportierenden Tasten hat.

Tippen Sie auf **Weiter**, um fortzufahren, oder **Abbrechen**, um zu beenden.

Das nächste Pop-up zeigt eine Vorschau der zu exportierenden Seite und die erste Gelegenheit, das PDF zu teilen.

Tippen Sie auf **Weiter**, um fortzufahren, **Zurück**, um zum vorherigen Pop-up zurückzukehren, oder **Abbrechen**, um zu beenden.

Farbebene und Ausrichtung wählen

Als Nächstes konfigurieren Sie den Export und wählen das Zielgerät.



Fig.10.2 Export-Zusammenfassung, die zeigt, was übertragen wird und was nicht.

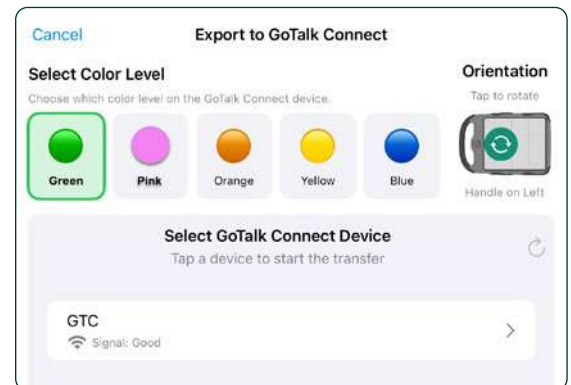


Fig.10.3 Wählen Sie die Farbebene, die iPad-Ausrichtung und das GoTalk Connect-Gerät.

Farbebene wählen

Ein GoTalk Connect-Gerät speichert bis zu fünf Kommunikationsseiten, geordnet nach Farbe: **Grün, Rosa, Orange, Gelb und Blau**. Jede Farbe ist eine eigene Speicherebene auf dem Gerät, und der Nutzer wechselt mit den Bedienelementen des Geräts zwischen den Ebenen.

Tippen Sie auf eine der fünf Farben, um zu wählen, welche Ebene die exportierte Seite ersetzt.



Erscheint Ihr GoTalk Connect nicht in der Liste, stellen Sie sicher, dass es eingeschaltet und Bluetooth auf dem iPad aktiviert ist. Tippen Sie zum erneuten Suchen auf das Aktualisierungssymbol.



Haben Sie die Auflage für das GoTalk Connect noch nicht gedruckt, tippen Sie auf **PDF teilen**, bevor Sie auf **Fertig** tippen. Das PDF lässt sich später durch erneuten Export nachdrucken.

Ausrichtung

Wählen Sie die Ausrichtung der gedruckten Auflage auf dem Gerät, indem Sie zum Drehen auf das Ausrichtungssymbol tippen. Die Beschriftung unter dem Symbol zeigt die aktuelle Einstellung (zum Beispiel **Griff links** oder **Griff rechts**), sodass Sie das Layout daran anpassen können, wie der Nutzer das Gerät am liebsten hält.

Ein GoTalk Connect-Gerät auswählen

Unter den Farb- und Ausrichtungseinstellungen erscheint eine Liste nahegelegener GoTalk Connect-Geräte. Jedes Gerät zeigt seinen Namen und die Signalstärke.

Tippen Sie auf einen Gerätenamen, um die Übertragung zu starten. Der Export erstellt eine PDF-Auflage und sendet die Audio- und Hotspot-Daten auf der gewählten Farbebene an das Gerät.

Wenn Sie nur das druckbare PDF brauchen und nicht an das Gerät übertragen möchten, tippen Sie stattdessen auf **Übertragung überspringen**.

Übertragung abgeschlossen

Wenn der Export abgeschlossen ist, erscheint ein Bestätigungsbildschirm.

Die Zusammenfassung zeigt, was exportiert wurde:

- **Erzeugtes PDF:** bestätigt, dass die druckbare Auflage erstellt wurde.
- **Übertragene Hotspots:** die Anzahl der an das Gerät gesendeten Touch-Hotspots.
- **Übertragene Audiodateien:** die Anzahl der gesendeten Audiodateien (oder **Keine**, wenn den Tasten der Seite kein Audio zugeordnet war).

Um die PDF-Auflage zu drucken oder erneut zu teilen, tippen Sie auf **PDF teilen**. Dies öffnet das iOS-Teilen-Menü mit Optionen für AirDrop, E-Mail, Drucken und andere Apps.

Tippen Sie auf **Fertig**, um zum Seiten-Editor zurückzukehren.

Was nicht übertragen wird

Da **GoTalk Connect** ein Mid-Tech-Gerät ist, lassen sich einige **GoTalk NOW** Funktionen nicht darauf übertragen. Der Export überspringt:

- Seiten-Assistent, Schnell-Editor und andere App-Funktionen, die auf dem Gerät keine Entsprechung haben.
- Aktionsarten, die das iPad voraussetzen, wie URL öffnen, Video abspielen, GoVisual, Apple Home-Szene, Media Player, iClick und Quiz.
- Express-Seiten und die Express-Satzleiste.
- Laut-aussprechen-Animationen (das Audio wird weiterhin als Aufnahme übertragen, gesteuert durch die Einstellung **Audio-Exportstil**; siehe Abschnitt 2.1.9).
- Tastaturseiten.

Tasten, die auf **Text-to-Speech** oder **Aufgenommenes Audio** eingestellt sind, werden als Audioaufnahmen übertragen; das GoTalk Connect spielt das Audio ab, wenn der passende Bereich auf der gedruckten Auflage gedrückt wird.

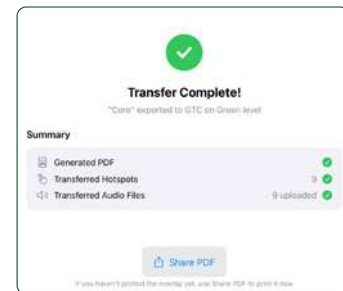


Fig.10.4 Wählen Sie nach Abschluss der Übertragung **PDF teilen**, falls die Auflage noch nicht gedruckt wurde.

EINSTELLUNGEN

APPLE-DATENSCHUTZ (in den iPad-Einstellungen)

Mit diesen Einstellungen erlauben oder beschränken Sie den Zugriff auf folgende Funktionen des iPads:

- **Fotos**
- **Mikrofon**
- **Kamera**
- **Apple Intelligence & Siri**
- **Suchen**
- **Bluetooth**
- **Lokales Netzwerk**
- **Spracherkennung**
- **Home-Informationen**
- **Medien & Apple Music**



AUSRICHTUNGSSPERRE: Die Ausrichtung des iPads lässt sich sperren. Um das Kontrollzentrum des iPads zu öffnen, wischen Sie von der oberen rechten

Ecke nach unten. Tippen Sie auf das Schlosssymbol, um die Ausrichtungssperre ein- oder auszuschalten; die Symbolfarbe ändert sich. Ist die Sperre aktiv, bleibt das iPad in seiner aktuellen Ausrichtung. Stellen Sie sicher, dass das iPad im Querformat ist, bevor Sie die Sperre aktivieren.



GOTALK NOW APP-EINSTELLUNGEN:

Tippen Sie auf dem Startbildschirm der App auf Einstellungen, um Editor- und Player-Einstellungen anzupassen.

Diese Liste folgt der Reihenfolge, in der die Einträge in der Kategorie Alle Einstellungen erscheinen.

TASTEN

LINKE UND RECHTE NAVIGATIONSTASTEN: Ein/Aus

Eingeschaltet werden die Navigationstasten im Player-Bildschirm angezeigt. Seiten lassen sich auch anders navigieren: per Wischgesten, durch Zuweisen einer Aktion oder Folgeaktion Springen zu an eine Kommunikationstaste oder über die Taste Springen zu in der Navigationsleiste, die alle Seiten des Buchs auflistet.

START-TASTE: Ein/Aus

Eingeschaltet wird die Start-Taste im Player-Bildschirm angezeigt. Die Start-Taste führt zur ersten Seite des Buchs. Sie dient auch zur Rückkehr zum Hauptmenü von GTN, wenn die Taste 10 Sekunden gedrückt gehalten wird.

ZURÜCK-TASTE: Ein/Aus

Eingeschaltet wird die Zurück-Taste im Player-Bildschirm angezeigt. Beim Auswählen wechselt sie zur zuvor angezeigten Seite.

SPRINGEN-ZU-TASTE: Ein/Aus

Eingeschaltet wird die Taste Springen zu im Player-Bildschirm angezeigt. Beim Auswählen erscheint eine Liste aller Seiten des Buchs; wählen Sie eine Seite aus.

SCHNELLTASTE: Aus/4 Nachrichten/8 Nachrichten

Auf jeder Seite des Buchs wird eine Schnelltaste in der Navigationsleiste platziert, die vier oder acht zusätzliche Nachrichten bietet.

ZWEI-FINGER-WISCHEN DEAKTIVIEREN: Ein/Aus

Eingeschaltet lässt sich der Player nur verlassen, indem die Start-Taste 10 Sekunden gedrückt gehalten wird.

AKTION DER START-TASTE: Wählen Sie, was beim Tippen der Start-Taste im Player geschieht: Zur ersten Seite oder Player verlassen.

PLAYER-EINSTELLUNGEN

TASTE WÄHREND DER WIEDERGABE VERGRÖßERN: Ein/Aus

Eingeschaltet werden die Kommunikationstasten während der Audiowiedergabe größer.

TASTENDRUCK-ANIMATION: Ein/Aus

Eingeschaltet bestätigt eine kurze Animation, wenn eine Taste ausgelöst wird.

AKTIVIERUNGSSCHEMA: Ein/Aus

Eingeschaltet wird ausgelösten Tasten ein eigenes Farbschema zugewiesen; verschiedene Farbschemata stehen zur Wahl.

NAVIGATION PER WISCHEN LINKS UND RECHTS: Ein/Aus

Eingeschaltet lassen sich Seiten per Fingerwischen auf dem Bildschirm navigieren

RUHEZUSTAND VERHINDERN: Ein/Aus

Eingeschaltet bleibt der Bildschirm während der Player-Nutzung an.

ANDERES AUDIO STOPPEN: Ein/Aus

Eingeschaltet pausiert anderes auf dem iPad laufendes Audio, wenn eine Kommunikationstaste getippt wird.

BERÜHRUNGSART FÜR DIE TASTENAUSLÖSUNG:

Beim Loslassen/Beim Berühren/Beim Anheben

- **Beim Loslassen:** Tasten werden ausgelöst, wenn der Finger vom Bildschirm abhebt.
- **Beim Berühren:** Tasten werden ausgelöst, sobald der Finger den Bildschirm berührt.
- **Beim Anheben:** Berühren Sie eine beliebige Stelle der Seite, ziehen Sie den Finger zur Taste und heben ihn an, um diese Taste auszulösen. Das Anheben über leerem Raum bricht die Interaktion ab.

HÖRSIGNALE: : Aus/Normale

Lautstärke/Geringere Lautstärke/Links/Rechts-Panorama/Privat (Ohrhörer) Scannen. Bei direkter Auswahl wird das Signal beim ersten Tippen der Seite oder Taste abgespielt. Tippen Sie erneut, um die Hauptaktion auszulösen.

- **Normale Lautstärke:** Signal und Nachricht werden in gleicher Lautstärke abgespielt.
- **Geringere Lautstärke:** Das Signal wird leiser als die Tastennachricht abgespielt.
- **Panorama:** Sendet das Signal auf den rechten Kanal und die Tastennachricht auf den linken Kanal. Mit einem Audio-Splitter lassen sich so Signale an Kopfhörer senden, während anderes Audio über einen Lautsprecher läuft.
- **Privat:** Das Signal wird über am iPad angeschlossene Ohrhörer gehört, während die Hauptnachricht über den iPad-Lautsprecher läuft.

LEERE HÖRSIGNALE ÜBERSPRINGEN: Ein/Aus

Bei Verwendung von Hörsignalen werden Tasten ohne Hörsignal mit einem einzigen Tippen ausgelöst.

HÖRSIGNALE FÜR NAVIGATION/OBERFLÄCHE: Ein/Aus

Eingeschaltet werden den Navigationstasten des Players wie Start und Zurück Hörsignale hinzugefügt. Das erste Tippen gibt das Hörsignal, ein zweites Tippen löst die Tastenaktion aus.

PLAYER-EINSTELLUNGEN

CONTINUED

CODE ZUM VERLASSEN DES PLAYERS

ERFORDERLICH: Ein/Aus

Eingeschaltet ist ein vierstelliger Code nötig, um den Player zu verlassen.

- **Code festlegen:** Um den vierstelligen Code zum Verlassen zu erstellen, drücken Sie auf **Nicht festgelegt** und geben die vier Ziffern des Codes ein.

BÜCHER BEIM ÖFFNEN NICHT KONVERTIEREN: Ein/Aus

Eingeschaltet wird die automatische Buchformat-Konvertierung übersprungen. Nur verwenden, wenn der Attainment-Support dies bei der Behebung von Bildanzeigeproblemen anweist.

VORHERSAGE AUF TASTATURSEITE DEAKTIVIEREN: Ein/Aus

Eingeschaltet werden auf Tastaturseiten keine Wortvorhersagen angezeigt.

BEDIENUNGSHILFEN

ENTPRELLEN: Keine/Dauerwerte von

¼ Sekunde bis 20 Sekunden

Die Zeitspanne, in der wiederholte Eingaben ignoriert werden. Die Entprell-Einstellung hilft, versehentliche wiederholte Tastentipps während der angegebenen Dauer zu vermeiden.

VERWEILEN: Keine/Dauerwerte von

¼ Sekunde bis 20 Sekunden

Löst Tasten aus, indem ein Finger für eine festgelegte Dauer darauf gehalten wird.

SCANNEN

SCAN-GERÄTETYP: Keine/Tilde-Nummern-Schalter/

Leer- und Eingabetaste-Schalter/Bildschirm als Schalter verwenden. Schalten Sie das Scannen ein, indem Sie die Schalterschnittstelle wählen.

- **Tilde-/Nummern-Schalter:** Für ein Schalter-System auf Basis der Tilde-Taste (~) und der Nummerntaste.
- **Leer- und Eingabetaste-Schalter:** Für ein Schalter-System auf Basis der Eingabetaste und der Leertaste.
- **Bildschirm als Schalter:** Macht den iPad-Bildschirm zu einem Zwei-Tasten-Schalter (links rückt die Auswahl vor, rechts wählt aus). Beim automatischen Scannen wird das iPad zu einem Ein-Tasten-Schalter.

AUTOMATISCHES SCANNEN: Ein/Aus

Eingeschaltet wählt ein einzelner Schalter eine Taste, die nacheinander auf dem Bildschirm hervorgehoben wird.

Ausgeschaltet werden zwei Schalter zum Schritt-Scannen verwendet. Bei zwei Schaltern wechselt der linke zur nächsten Taste, der rechte löst die Auswahl aus. Außerdem muss ein Scan-Gerätetyp gewählt sein, damit automatisches oder Schritt-Scannen funktioniert.

- **Scannen automatisch starten:** Ein/Aus
Eingeschaltet startet das Scannen automatisch beim Öffnen einer Seite. Ausgeschaltet beginnt das Scannen erst, wenn ein Schalter betätigt wird.
- **Geschwindigkeit des automatischen Scannens:** Wählen Sie, wie lange jede Taste hervorgehoben wird, von 1 bis 10 Sekunden.
- **Wiederholung des automatischen Scannens:** Wählen Sie, wie oft der Scan-Durchlauf auf einer Seite wiederholt wird.

SCANNEN *CONTINUED*

GRUPPIERUNG: Keine/Zeile zuerst/Spalte zuerst/Viertelzeile/Viertelspalte/Halbe Zeile/Halbe Spalte/Viererzeile/Viererspalte

Die Scan-Reihenfolge lässt sich anpassen, um mehrere Tasten zu gruppieren. Nach Auswahl einer Gruppe wird jede Taste der Gruppe gescannt.

SCHALTERFUNKTIONEN TAUSCHEN: Ein/Aus (bei zwei Schaltern)

- **Aus:** Der linke Schalter rückt den Scan vor, der rechte wählt aus.
- **Ein:** Der rechte Schalter rückt den Scan vor, der linke wählt aus.

NAVIGATIONSTASTEN SCANNEN: Ein/Aus
Eingeschaltet werden die Navigationstasten des Players in die Scan-Reihenfolge einbezogen.

VON AKTUELLER POSITION FORTSETZEN: Ein/Aus
Diese Einstellung legt fest, wo das Scannen nach einer Schalterauswahl fortgesetzt wird.

- **Ein:** Scannen ab der letzten Auswahl fortsetzen.
- **Aus:** Scannen oben auf der Seite fortsetzen.

GOTALK NOW HÖRSIGNALE STATT IOS-SIGNALE VERWENDEN: Ein/Aus

Bei aktiver iOS-Schaltersteuerung.

- **Ein:** In GoTalk NOW eingerichtete Signale werden abgespielt.
- **Aus:** Signale der iOS-Schaltersteuerung werden abgespielt.

TEXT-TO-SPEECH-EINSTELLUNGEN

GESCHWINDIGKEIT: Die Geschwindigkeit der Text-to-Speech-Stimmen; der Regler reicht von langsam bis schnell.

ACAPELA TTS LAUTSTÄRKEANHEBUNG: Die Lautstärke der Acapela-Text-to-Speech-Stimmen im Verhältnis zu anderem Audio; der Regler reicht von keiner Änderung bis starke Änderung.

EDITOR-EINSTELLUNGEN

NEUE TASTEN MIT ZULETZT VERWENDETER

SCHRIFT ERSTELLEN: Ein/Aus

Eingeschaltet verwenden neue Nachrichtentasten dieselbe Schrift, Größe und denselben Stil wie die zuletzt bearbeitete Taste.

SYMBOLPOSITION: Legt die Position der Bilder auf neu erstellten Tasten fest, nicht auf bestehenden: über/unter/links/rechts vom Text.

SCHWELLE FÜR KONSISTENTE TASTEN: Beim Erstellen einer Seite *Konsistentes Tastenraster* im *Seiten-Assistent* lässt sich der Prozentsatz der Seiten, auf denen Tasten an derselben Position auf ähnlich großen Rasterseiten erscheinen, von 50 % bis 100 % einstellen.

EXPRESS-SEITEN-EINSTELLUNGEN

POSITION DER EXPRESS-LEISTE: Ein/Aus

Eingeschaltet befindet sich die Express-Leiste oben auf der Seite. Ausgeschaltet befindet sich die Express-Leiste unten auf der Seite.

EXPRESS-WIEDERHOLUNG DEAKTIVIEREN: Ein/Aus

Eingeschaltet ist die Taste Wiederholen (Nachricht) auf den Express-Leisten-Seiten deaktiviert.

NEUE SEITEN ALS EXPRESS-SEITEN ERSTELLEN: Ein/Aus

Eingeschaltet enthalten neue leere Seiten automatisch die Express-Leiste.

TTS-ELEMENTE BEIM SPRECHEN ZUSAMMENFASSEN:

Ein/Aus

Eingeschaltet liest die Text-to-Speech-Nachricht der Express-Leiste alle Wörter/Tastentexte als natürlichen Satz zusammen. Ausgeschaltet entsteht eine Pause zwischen den Wörtern/Tastentexten.

ALS WORTFRAGMENTE ZUSAMMENFASSEN: Ein/Aus

Eingeschaltet werden Buchstaben als Wortteile gelesen. Ausgeschaltet werden Buchstaben als Buchstaben gelesen.

ANSAMMLUNG VON RECHTS NACH LINKS: Ein/Aus

Eingeschaltet sammelt sich Text von rechts nach links. Ausgeschaltet sammelt sich der Text von links nach rechts.

BEIM HINZUFÜGEN ABSPIELEN: Ein/Aus

Eingeschaltet wird jeder Text vorgelesen, sobald er der Express-Leiste hinzugefügt wird. Ausgeschaltet wird der Text nur vorgelesen, wenn die Express-Leiste getippt wird.

EXPRESS-LEISTE SCANNEN: Ein/Aus

Eingeschaltet werden die Express-Leiste und ihre Steuertasten in die Scan-Reihenfolge einbezogen.

VOICEOVER

HÖRSIGNAL-TEXT-TO-SPEECH ALS VOICEOVER-

HINWEIS VERWENDEN: Ein/Aus

Eingeschaltet und bei aktivem iOS-VoiceOver dient das Hörsignal der Taste als VoiceOver-Hinweis.

VIDEOTASTEN

ALTERNATIVE OBERFLÄCHE: Ein/Aus

Eingeschaltet wird eine vereinfachte Videoplayer-Oberfläche mit nur den Tasten Abspielen und Beenden angezeigt.

VIDEOS ZUSCHNEIDEN: Ein/Aus

Eingeschaltet ist das Zuschneiden von Videoaufnahmen nach der Aufnahme erlaubt. Ausgeschaltet werden vollständige Videoaufnahmen ohne Zuschneideoption behalten.

ADMINISTRATION

Wenn der Code zum Verlassen des Players nicht verfügbar ist, folgen Sie diesen Schritten, um auf die App-Einstellungen zuzugreifen:

1. Beenden Sie **GoTalk NOW**.
2. Öffnen Sie die iPad-Einstellungen, scrollen Sie zur App-Liste und wählen **GoTalk NOW**.
3. Suchen Sie in den App-Einstellungen die Einstellung Beim nächsten Start zum Hauptmenü und schalten sie EIN.
4. Öffnen Sie **GoTalk NOW** und tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Schaltfläche Einstellungen.
5. Verwenden Sie Code festlegen, um einen neuen Code zu erstellen, oder die Einstellung Code zum Verlassen des Players erforderlich, um die Code-Pflicht auszuschalten.

ADMINISTRATION *CONTINUED*

BEIM NÄCHSTEN START ZUM HAUPTMENÜ: Ein/Aus

Eingeschaltet öffnet GoTalk NOW die Startseite der App.

Ausgeschaltet öffnet es das zuletzt verwendete Buch und die zuletzt verwendete Seite.

INTERNETSUCHE DEAKTIVIEREN: Ein/Aus

Eingeschaltet wird die Bildsuche im Internet verhindert. Nur lokale Fotos und heruntergeladene Bildbibliotheken sind verfügbar.

GERÄTESUCHE ZULASSEN (SPOTLIGHT): Ein/Aus

Eingeschaltet steht iOS-Spotlight bereit, um Kommunikationsbücher nach Tastentextinhalten zu durchsuchen.

SCHNELL-/JUST-IN-TIME-BEARBEITUNG

SCHNELL-EDITOR BEVORZUGEN (DIESES BUCH): Ein/Aus

Eingeschaltet zeigt der Schnell-Editor für dieses Buch alle Tasteneigenschaften auf einem Bildschirm.

Ausgeschaltet (und wenn die Einstellung Immer Schnell-Editor bevorzugen aus ist) wird für dieses Buch der Klassische Editor verwendet. Der Klassische Editor bietet präzise Kontrolle über Text- und Bildplatzierung und unterstützt das Hinzufügen mehrerer Bilder zu einer einzelnen Taste.

IMMER SCHNELL-EDITOR BEVORZUGEN: Ein/Aus

Eingeschaltet wird der Schnell-Editor zum Standard für alle Bücher. Der Schnell-Editor zeigt alle Tasteneigenschaften auf einem Bildschirm.

Ausgeschaltet und wenn die Einstellung Schnell-Editor bevorzugen (dieses Buch) aus ist, wird der Klassische Editor verwendet. Der Klassische Editor bietet präzise Kontrolle über Text- und Bildplatzierung und unterstützt das Hinzufügen mehrerer Bilder zu einer einzelnen Taste.

KLASSISCHEN AKTIONS-EDITOR VERWENDEN: Ein/Aus

Eingeschaltet werden die verfügbaren Aktionsoptionen in einem horizontalen Karussell zum Wischen angezeigt.

Ausgeschaltet werden die verfügbaren Aktionsoptionen in einem Aufklappmenü angezeigt.

JUST-IN-TIME-TASTENBEARBEITUNG: Ein/Aus

Eingeschaltet lassen sich leeren Nachrichtentasten im Player Inhalte hinzufügen.

Ausgeschaltet muss alle Bearbeitung über den Seiten-Editor erfolgen.

EXPERIMENTELLE FUNKTIONEN

ALLE BILDER AUSBLENDEN (NUR TEXTTASTEN): Ein/Aus

Mit dieser Einstellung wird nur der den Nachrichtentasten zugewiesene Textinhalt angezeigt.

SWITCHAMAJIG-UNTERSTÜTZUNG: Ein/Aus

Eingeschaltet wird der Switchamajig unterstützt, eine Drittanbieter-Technologie, die ein iPad als Steuerung für Schalternutzer und zur Steuerung von Haushaltsgeräten nutzt.

VOLLBILD-SCANNEN: Ein/Aus

Eingeschaltet werden Tasten beim Schalter-Scannen größer.

TACTILE TALK-UNTERSTÜTZUNG: Ein/Aus

Eingeschaltet ist nur die rechte Seite jeder Nachrichtentaste berührungsempfindlich.

Das Tactile Talk Toolkit von Attainment Company hat physische Objekte an Bildschirm-Overlay-Folien befestigt. Die Objekte werden auf der linken Seite der Nachrichtentasten platziert.

VORLAGENSPRACHE: Sprachauswahl

Wählen Sie eine Sprache, um die in der Online-Galerie angezeigten Vorlagen zu filtern.

NEUE SEITEN MIT ALTERNATIVEM LAYOUT ERSTELLEN:

Ein/Aus

Eingeschaltet verwenden neue Seiten das alternative Layout, das präzise Pixelpositionierung für die Verwendung mit Tastaturschutzgittern bietet.

ALTERNATIVE SEITENLAYOUTS IGNORIEREN: Ein/Aus

Eingeschaltet werden nur Seiten im Standardlayout angezeigt; Seiten mit alternativem Tastaturschutz-Layout werden übersprungen. Dies dient meist der Fehlerbehebung, wenn die Menüleistentasten ausgeblendet sind (sowohl Player als auch Editor).

ENTPRELL-TIMER STARTET NACH AKTION: Ein/Aus

Eingeschaltet startet der Entprell-Timer, nachdem die Tastenaktion abgeschlossen ist.

Ausgeschaltet startet der Entprell-Timer, nachdem eine Taste ausgewählt wurde.

WEITERE EINSTELLUNGEN

EINFACHE WISCHGESTEN ZUR SEITENNAVIGATION: Ein/Aus

Eingeschaltet nutzen Wischgesten zur Seitennavigation die Standard-Gestenempfindlichkeit von iOS.

Ausgeschaltet erfordern Wischgesten zur Seitennavigation eine längere und schnellere Bewegung, um versehentliche Seitenwechsel zu vermeiden.

BILDER AUF VORHERSAGEN: Ein/Aus

Eingeschaltet werden Bilder, die die KI auf passenden Tasten anderer Seiten gefunden hat, oder Vorschläge aus Bildbibliotheken auf den Wortvorhersagetasten angezeigt.

VORSCHLÄGE NUR AUS BUCHINHALT: Ein/Aus

Eingeschaltet sind Wortvorhersagen auf den Buchwortschatz und häufig getippte Wörter beschränkt.

PHRASENVERLAUF:

Merkt sich auf der Tastatur erzeugte Phrasen, um sie schneller vorzuschlagen.

Die Optionen reichen von aus über 60 Minuten bis hin zu dauerhaft behalten.

VERLAUFSVORSCHLÄGE EINFÄRBen: Ein/Aus
Unterscheidet verlaufs-basierte von KI-generierten Vorschlägen mithilfe eingefärbter Tasten.

ANSTOSS ZUR WORTSCHATZERWEITERUNG: Ein/Aus
Schlägt gelegentlich neue Phrasen vor, wenn dieselben wiederholt verwendet werden.

ANSTOSSSTÄRKE:

Die Häufigkeit, mit der neue Vorschläge angezeigt werden.

NEUE SEITEN AM ENDE HINZUFÜGEN: Ein/Aus
Eingeschaltet werden neue Seiten am Ende des Buchs statt nach der aktuellen Seite hinzugefügt.

HOTSPOT-STIL:

Im Editor werden die Hotspot-Ränder von Szenenseiten mit glatten Rändern oder mit Griffen angezeigt.

GRÖSSE DER HOTSPOT-ZIEHZONE:

Die Größe der Eck-Ziehpunkte zum Ändern der Hotspot-Größe lässt sich auf Klein, Normal oder Groß einstellen.

WISCHNAVIGATION IM SZENEN-EDITOR: Ein/Aus
Eingeschaltet lassen sich Szenenseiten beim Bearbeiten nach links oder rechts wischen.

ANIMATIONEN REDUZIEREN: Ein/Aus
Eingeschaltet werden Bewegungseffekte im Editor und Player minimiert.

IDENTISCHE TASTEN:

Wenn ein Buch identische Tasten mit gleichem Aussehen und gleicher Aktion hat und eine geändert wird, erscheint die Option, die Änderung für alle zu übernehmen. Die Meldung bietet die Optionen Jedes Mal fragen, Immer aktualisieren oder Nie aktualisieren.

ÄHNLICH AUSSEHENDE TASTEN:

Wenn ein Buch ähnlich aussehende Tasten mit gleichem Aussehen und unterschiedlichen Aktionen hat und eine geändert wird, erscheint die Option, die Änderung für alle zu übernehmen. Die Meldung bietet die Optionen Jedes Mal fragen, Immer aktualisieren oder Nie aktualisieren.

ZIEHEN DER EXPRESS-LEISTE DEAKTIVIEREN: Ein/Aus
Eingeschaltet ist das manuelle Ziehen zum Zurückblättern durch die Nachricht deaktiviert.

TIPPS ANZEIGEN: Ein/Aus
Eingeschaltet werden beim Erkunden der App hilfreiche Tipps angezeigt.

- **Alle Tipps ansehen:** Auswählen, um eine Liste der in der App enthaltenen Tipps anzuzeigen.
- **Alle Tipps zurücksetzen:** Auswählen, um den Status aller Tipps von Angesehen auf Neu zurückzusetzen.

STATUSLEISTE ANZEIGEN: Ein/Aus

Eingeschaltet ist die iPad-Statusleiste mit Uhrzeit und Akkustand oben am Bildschirm sichtbar.

CARA (CONVERSATION-AWARE RESPONSE ASSISTANT):

Ein/Aus

Eingeschaltet erscheint auf Tastaturseiten eine Mikrofontaste.

Beim Tippen des Mikrofons hört CARA Gesprächen zu und schlägt Antworten vor. Erfordert iOS 26 oder neuer.

- **Automatisch zuhören:** Ein/Aus
Eingeschaltet hört CARA auf Tastaturseiten automatisch zu. Erfordert iOS 26 oder neuer.
- **Wartezeit bei Aussagen:** Aus/2-5 Sekunden
Eingeschaltet wartet CARA die gewählte Zeit, bevor sie Vorschläge erzeugt, wenn keine Frage erkannt wird. Auf Aus stellen, um nur auf Fragen zu reagieren. Erfordert iOS 26 oder neuer.
- **Kontextsätze:** 1/2/3 Sätze
Legt fest, wie viele Sätze vor der Frage CARA als Kontext nutzt. Erfordert iOS 26 oder neuer.
- **Antwortstil:** Der Stil oder Ton der CARA-Antworten lässt sich im vorgesehenen Feld auswählen oder eingeben. Erfordert iOS 26 oder neuer.

STARTPHRASEN: Eingeschaltet erscheinen bearbeitbare Startphrasen in der Vorhersagezeile der Tastatur, wenn das Textfeld leer ist. Die Liste der Startphrasen lässt sich bearbeiten.

KI-SATZVERVOLLSTÄNDIGUNGEN: Ein/Aus

Eingeschaltet schlägt die KI nach einer kurzen Tipp-pause Satzenden in der Vorhersagezeile vor. Erfordert iOS 26 oder neuer.

WORTFORMEN: Ein/Aus

Eingeschaltet schlägt ein langes Drücken auf einen Wortvorschlag in der Vorhersagezeile alternative Formen vor, etwa verschiedene Zeitformen, Pluralformen und mehr.

- **Intelligente Wortformen:** Ein/Aus
Eingeschaltet werden grammatisch korrekte Formen auf Basis des bereits Getippten angezeigt.
- **Wortformen beim Scannen:** Ein/Aus
Eingeschaltet und bei aktivem Scannen erweitern sich die Vorschläge, um Wortformen auf den Scan-Hervorhebungen anzuzeigen.

BUCHSPRACHE: Wählen Sie die Sprache für KI-Vorschläge, Wortformen und Seitenerzeugung.

BILD BEIM ERSTEN HOTSPOT SPERREN: Ein/Aus

Eingeschaltet wird das Szenenbild gesperrt, wenn der erste Hotspot hinzugefügt wird.

PERSONENERKENNUNG: Ein/Aus

Eingeschaltet werden Personen in Szenenbildern erkannt, um schnell Hotspots hinzuzufügen. Gesichtserkennung erfolgt nur, wenn benannte Personen hinzugefügt werden oder wenn die Einstellung Unbekannte Personen lernen eingeschaltet ist. Die gesamte Verarbeitung erfolgt ausschließlich auf dem Gerät.

- **Unbekannte Personen lernen:** Ein/Aus
Eingeschaltet lernt die Gesichtserkennung unbekannte Gesichter über Szenenseiten hinweg. Namen lassen sich hinzufügen, um schnell Hotspots zu erstellen. Alle Gesichtsdaten verlassen das Gerät nie.
- **Personen verwalten**
Erfasste Personen hinzufügen, entfernen und bearbeiten.

VERLAUFSFENSTER ZUM RÜCKGÄNGIGMACHEN: Aus bis zu einem Monat

Geänderte Bucheinstellungen werden unter Kürzlich geändert aufgeführt. Dieser Verlauf hilft, Änderungen an Einstellungen schnell rückgängig zu machen. Nach der festgelegten Zeit werden Änderungen zu dauerhaftem Verlauf. Ausgeschaltet ist das Rückgängigmachen deaktiviert.

SEGMENTIERUNGSSTIL: Anlaut-Reim/Silbe

Wählen Sie, wie Wörter in Teile zerlegt werden. Anlaut-Reim trennt am ersten Vokal. Silbe trennt nach Silben.

TEMPO: Langsam/Normal/Schnell

Legt fest, wie lange jedes Wortsegment angezeigt wird.

STIMME ZUM ENTSCHLÜSSELN: Stimmenauswahl

Wählen Sie die Stimme zum Entschlüsseln von Segmenten. Systemstimmen unterstützen die verlangsamte Aussprache, die zum Entschlüsseln von Wörtern nötig ist.

NACH LAUT AUSSPRECHEN: Fortfahren/Auf Tippen warten

Wählen Sie, was nach der Animation geschieht. Fortfahren: Das Overlay wird automatisch geschlossen. Auf Tippen warten: Das Overlay bleibt sichtbar, bis es angetippt wird.

- **Auf alle TTS-Tasten anwenden:** Aus/Ganzes Wort/Lautieren Macht jede Text-to-Speech-Taste zu einer Laut-aussprechen-Taste.
- **Lese-Leiste:** Ein/Aus
Zeigt den Satztext während der Wiedergabe von Express-Seiten an. Eingeschaltet sammeln sich Tasten auf Express-Seiten still an, ohne Laut-aussprechen-Overlays.
- **Anzeigedauer der Lese-Leiste:** Kurz/Bis geschlossen Wählen Sie, wie lange die Lese-Leiste nach der Wiedergabe sichtbar bleibt.

AUDIOSTIL FÜR CONNECT-EXPORT: Taste folgen/Nur Wort/Erweiterte Mischung

Wählen Sie, wie Laut-aussprechen-Audio für den Export an GoTalk Connect vorbereitet wird.

MEDIEN-METADATEN BEIM EXPORT ENTFERNEN: Ein/Aus
In Media-Player-Tasten enthaltene Musik lässt sich nicht zwischen iPads übertragen. Eingeschaltet sieht der Empfänger des Buchs keine Informationen über das Lied. Ausgeschaltet sieht der Empfänger Liedtitel und Interpret.

WARNUNG BEI FEHLENDEN MEDIEN SPRECHEN: Ein/Aus
Eingeschaltet wird eine verbale Warnung abgespielt, wenn Medien einer Taste fehlen.

KONTAKTINFORMATIONEN

Wir freuen uns über Ihre Fragen oder Anmerkungen.

Kontaktieren Sie uns per email: GoTalkNOW@AttainmentCompany.com

oder rufen Sie uns an:

Nordamerika (800) 327-4269

International +1 (608) 845-7880



P.O. Box 930160 - Verona WI 53593-0160 USA

www.AttainmentCompany.com

Mitwirkende

Mitwirkende

Projektleitung

Don Bastian

Joni Nygard

Programmierung

Barrett Jacobsen

Seth Hartwick

Qualitätssicherung

Jon Karbo

Ali Schlimgen

Grafikdesign (Benutzeroberfläche)

Josh Eacret

Erin Radermacher

Team für die Inhaltsentwicklung

Don Bastian

Craig Booth

Julie Denu

Autumn Garza

Seth Hartwick

Barrett Jacobsen

Jon Karbo

Scott Meister

David Nelson

Joni Nygard

Ali Schlimgen

Don Severson

Beiträge zum Programmcode von:

LightMenuBar

Haoxiang Li

ABPadLockScreen

Aron Bury

Enormego Cocoa Helpers

Enormego

SbTableAlert

Simon Blommegård

InAppSettingsKit

Luc Vandal & Ortwin Gentz

CMPPopTipView

Chris Miles

Asi-Http-Request

All-Seeing Interactive

SDWebImage

Olivier Poitrey

TouchJSON

Jonathan Wight

AQGridView

Jim Dovey

SVPProgressHUD

Sam Vermette

UAModalPanel

Urban Apps